

BESLIST BETER



Venta

Veiligheid en comfort nieuw gedefinieerd



Internationale editie


STIEGELMEYERGROUP



Venta – de perfecte combinatie van veiligheid en comfort

Een modern bed voor stationaire verzorging moet voldoen aan hoge, zeer uiteenlopende eisen. Bijzonder belangrijk is de werkverlichting voor het verplegend personeel: zelfs in noodsituaties en gespannen situaties moet het bed moeiteloos en ergonomisch te bedienen zijn. Tegelijkertijd verwacht de bewoner comfort en veiligheid zonder maatregelen die de vrijheid beperken. De innovatieve technologie voor deze vereisten mag het huiselijke uiterlijk van het bed echter niet beïnvloeden, omdat mensen zich in een knusse, aantrekkelijke omgeving veel prettiger voelen.

Met onze Venta hebben we antwoorden op deze vragen gevonden en een verpleegbed uit één stuk gecreëerd. Als een laag bed met een flexibel zijhek beschermt en mobiliseert de Venta de bewoner tegelijkertijd. De optionele LCD-handset met EasyCare-functie maakt een snelle en eenvoudige bediening voor alle gebruikersgroepen mogelijk. En visueel gezien is de Venta met zijn elegante uiterlijk en de softcovers naar keuze een comfortabel designbed voor elk interieur.

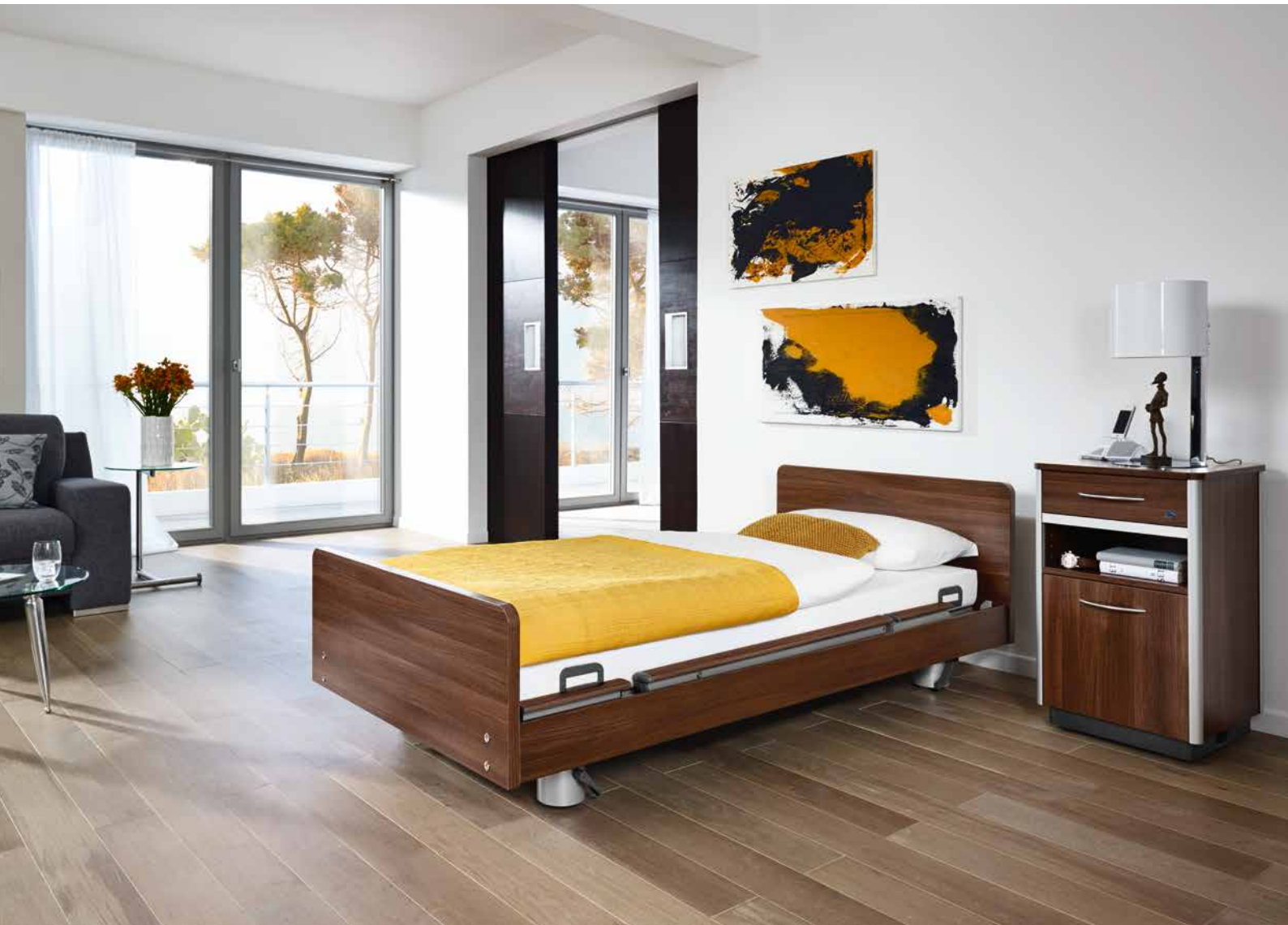

Inhoud

3	Modelvarianten	14	Insteekbeslag-hoofdbord	24	e-help
4	Venta – Standard	15	Hoofdeinden en dessins	25	24 volt-systeem
6	Venta – Variant movo	16	Onderstel	26	Toebehoren
7	Venta – Variant forto	17	Ligvlak, remmen	28	Uitvoeringen en opties
8	Zijhek	18	Bedverlenging	30	De Stiegmeyer-groep
10	Telescopische zijhekken	20	3-stop-functie		
12	Softcover	22	Innovatief bedieningsconcept		

Comfort



Venta – Standard

- **Hoogteverstelling:**
25 – 80 cm
- **Laag bed**
- **Ergonomische werkhogte:**
werkverlichting van de verzorger door rugvriendelijk werken op heuphoogte
- **Zwenkbare zijhekken**
met een beschermhoogte van 42 cm

Pagina 4

Mobiliteit



Venta – Variant movo

- **Hoogteverstelling:**
28 – 83 cm
- **Laag bed**
- **Wielen**
100 mm dubbele wielen voor uitstekende manoeuvreerbaarheid

Pagina 6

Zware belasting



Venta – Variant forto

- **Hoogteverstelling:**
37 – 81 cm
- **Veilige werklast:**
260 kg voor zware bewoners
- **Ligvlakbreedte:**
100 cm
- **Wielen**
125 mm wielen met een breedte van 32 mm

Pagina 7

Venta – Standard


Het huiselijke lage bed

Verpleeghuizen moeten hun bewoners beschermen tegen verwondingen door vallen zonder daarbij onnodig hun mobiliteit te beperken. Omdat vrijheidsbeperkende maatregelen (M&M) de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden aanzienlijk verminderen, de mentale en fysieke gezondheid schaden en juridisch gekoppeld zijn aan hoge barrières.

Onze Venta helpt om **M&M te vermijden**. Als laag bed dicht bij de grond vermindert het risico op letsel door vallen. Als de bewoner wil opstaan, kan hij automatisch de ergonomische hoogte van ongeveer 38 cm aanpassen met behulp van de handschakelaar en de 3-stop-functie. Het innovatieve zijhek biedt een **standaardconforme bescherming** en laat tegelijkertijd de onderste helft van het bed vrij voor ongehinderd in- en uitstappen.

- grote hoogteverstelling ca. 25 – 80 cm voor rugvriendelijke verzorging
- zijhek met één hand bedienbaar
- moderne handschakelaar voor intuïtieve bediening naar keuze
- grote keuze gezellige hoofdborden en dessins
- stoffen softcovers voor elke smaak

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

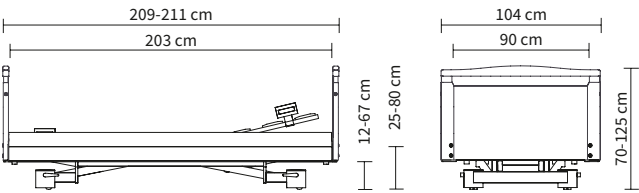

De Venta ontlast het verplegend personeel, bevordert de mobiliteit van de bewoners en overtuigt met een huiselijke uitstraling. Ontwerpelementen zoals de optionele softcover creëren een huiselijke privésfeer.



Laag bed





Venta – Variant movo


Bijzonder goed verrijdbaar voor een levendige dag

Laag bed

De variante movo van de Venta kenmerkt zich door bijzonder **goede rijeigenschappen**. Als gevolg hiervan kunnen bedlegerige bewoners gemakkelijker deelnemen aan het dagelijks leven in gemeenschappelijke ruimtes of op het terras en krijgen ze nieuwe levensvreugde. De verzorger wordt ontlast doordat het bed **eenvoudiger te manoeuvreren** is in kamers met meerdere bedden of in smalle gangen waardoor het risico op schade door botsingen afneemt.

- 100 mm dubbele zwenkwielen met zeer goede rijeigenschappen.
- standaard centrale wielvergrendeling
- grote hoogteverstelling ca. 28 – 83 cm

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

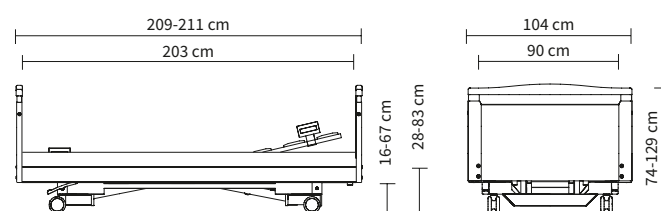

Venta – Variant forto


Comfort voor zware bewoners


Bed voor zware cliënten

Het aantal mensen met overgewicht is in de afgelopen 40 jaar in veel ontwikkelde landen verdubbeld. Obesitas treft ook steeds meer mensen. Deze ontwikkeling zal merkbaar zijn in de verpleging. De variant forto van de Venta scoort punten als een **heavy duty-bed** met ruimte, comfort en veiligheid. Met deze modelvariant is uw huis goed voorbereid op vele uitdagingen.

- hoge veilige werklust tot 260 kg
- ligvlakbreedte van 100 cm standaard
- belastbare 125 mm-wielen
- hoogteverstelling van 37 tot 81 cm voor comfortabel uitstappen en ergonomische verzorging
- comfortabele zitpositie

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

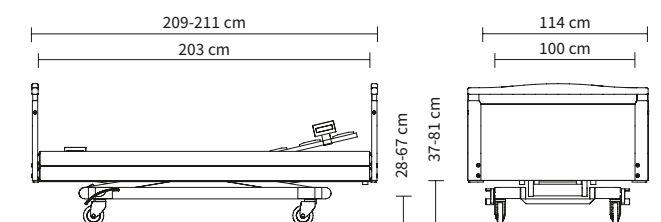

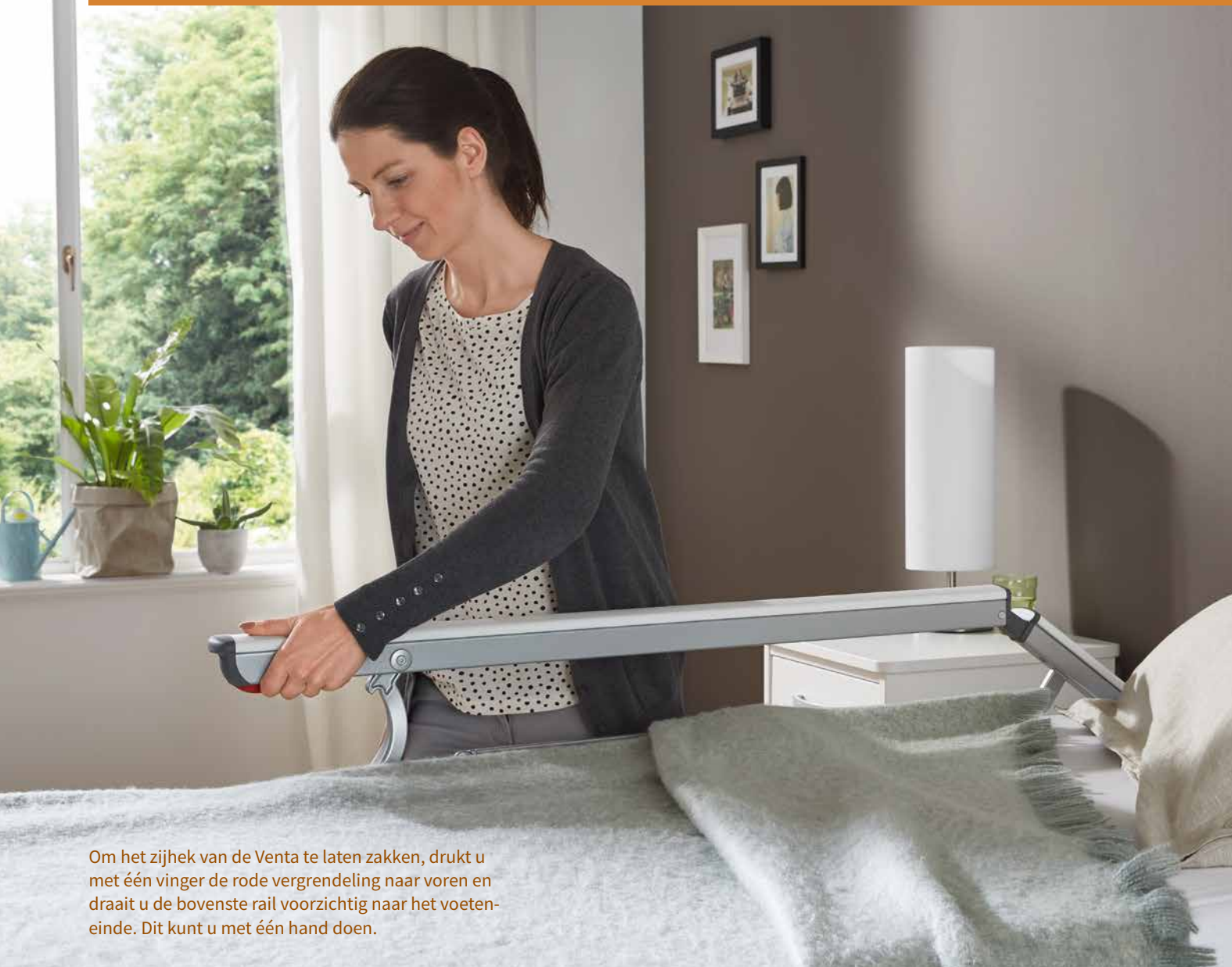

Om het zijhek van de Venta te laten zakken, drukt u met één vinger de rode vergrendeling naar voren en draait u de bovenste rail voorzichtig naar het voeteneinde. Dit kunt u met één hand doen.

Zijhek

Bescherming en mobiliteit in elke situatie

Het innovatieve zijhek is een van de grootste voordelen van de Venta. De stevige en toch fijne constructie beslaat 50% van de lengte van het ligvlak en biedt bescherming volgens de vereisten van **norm 60601-2-52**, zonder te voorkomen dat het bed via het **voeteneinde** kan worden verlaten. Zo wordt het gebruik van M&M voorkomen en wordt de filosofie van de **Werdenfelser-manier** bevordert om de mobiliteit van de bewoners te behouden.



- vrij zicht tussen de spijlen door
- elegante, discrete vorm
- de handgreep kan omlaag worden gezet om een zitje aan de rand van het bed te creëren.

Een optionele opvulling sluit de opening tussen de leuning en het voeteneinde van het bed in de neergelaten toestand.

Met een optionele hendel onder het zijpaneel kan het verlaagde zijhek worden vergrendeld. Dit voorkomt het per ongeluk verstellen tijdens de verzorging of in hectische situaties. De vergrendelingshendels zijn aan beide zijden gemonteerd.



Bediening met één hand

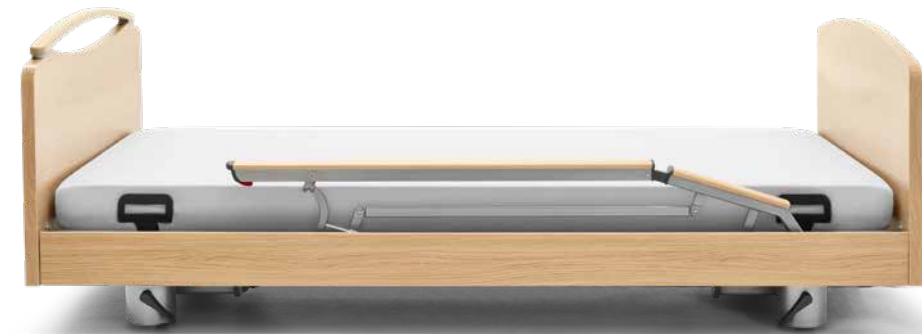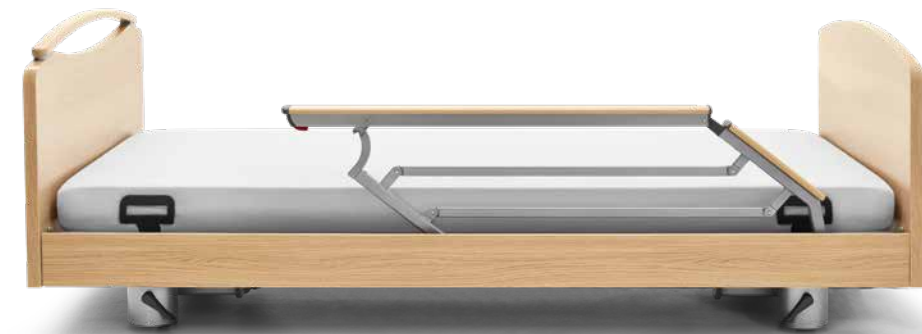

BESLIST BETER

Eenvoudige bediening met één hand

De eenvoudige bediening van het Venta-zijhek met slechts één hand helpt de zorgverlener in hectische situaties. Om een van de elementen te laten zakken, hoeft u alleen maar de **rode vergrendeling** naar voren te schuiven en tegelijkertijd, met zachte druk, de bovenste spijl richting voeteneind te zwenken. Voor het verstellen van het zijhek is een korte draai voldoende, dan wordt het zijhek vanzelf rechtgetrokken en klikt het stevig vast. Als de verzorger aan het voeteneind van het bed staat, kunnen beide handen gebruikt worden om tegelijkertijd de rechter- en linkerelementen **op te tillen** om tijd te besparen.




Telescopische zijhekken

Flexibele bescherming voor elke eis

Als het risico op vallen groot is, bijvoorbeeld door dementie, dan kan **uitgebreidere bescherming** nodig zijn. In dit geval raden we de optionele telescopische versie van het Venta-zijhek aan. Het bedekt ook slechts 50% van het ligoppervlak in de normale stand, maar indien nodig kunnen de spijlen zich bijna over de gehele lengte van het bed uitstrekken en veilig aan het uiteinde worden vergrendeld. Indien nodig kan de laatste kleine opening aan het voeteneinde worden afgesloten met een **opvulstuk**, dat als accessoire verkrijgbaar is.

Het telescopische zijhek ontlast het verplegend personeel door een moeiteloze **bediening met één hand**. Bovendien overtuigt deze variant door zijn flexibiliteit. Als een bewoner verschillende beschermingsniveaus nodig heeft gedurende de dag of als het bed moet worden gebruikt voor verschillende mensen, dan is het telescopische zijhek aan alle behoeften aan te passen. Dit vereenvoudigt de logistieke processen in de instelling en bespaart tijd en kosten.

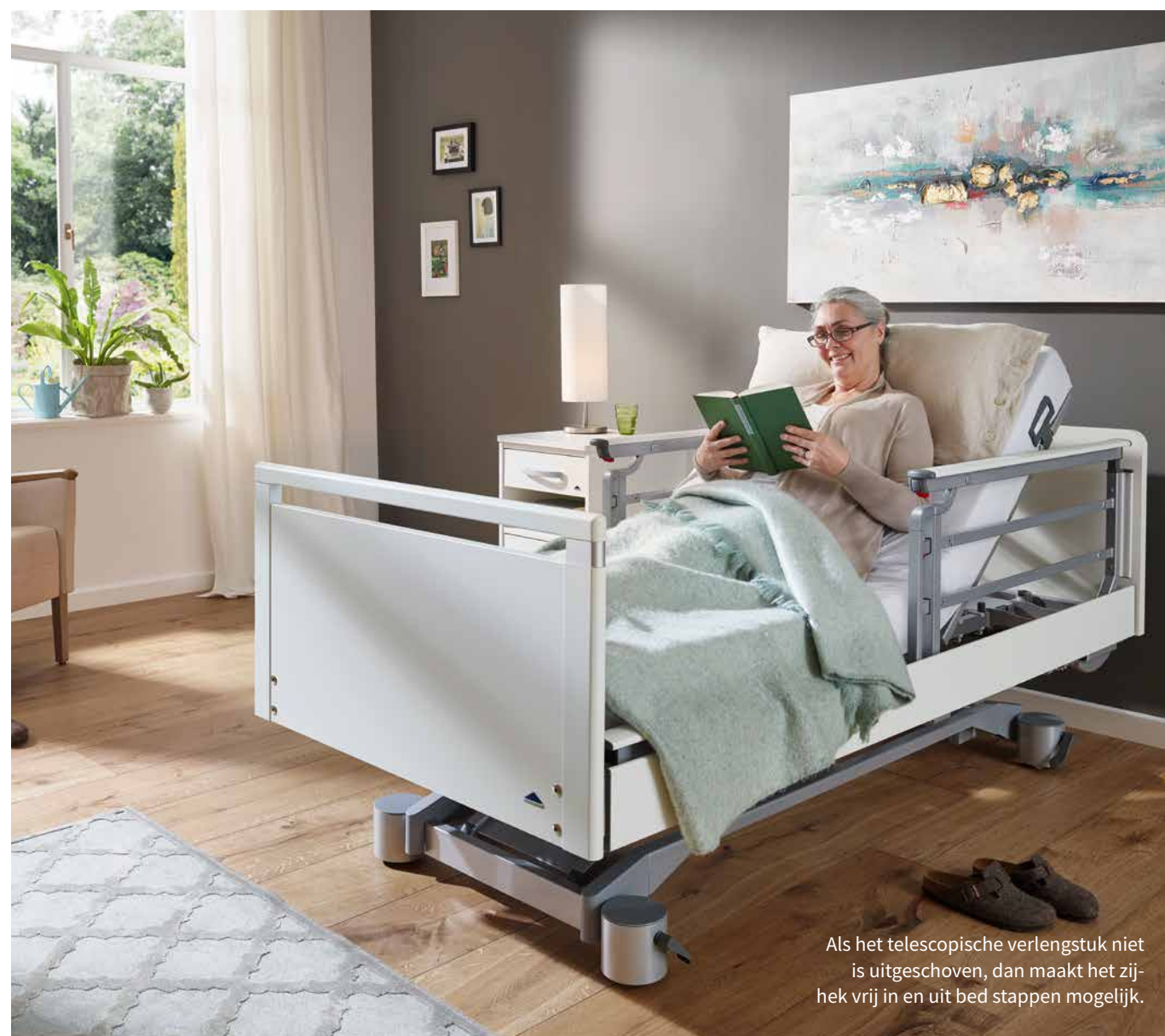

Als het telescopische verlengstuk niet is uitgeschoven, dan maakt het zijhek vrij in en uit bed stappen mogelijk.



▲ Het telescopische zijhek past zich flexibel aan veranderende veiligheidsbehoeften van de bewoners aan.



BESLIST BETER

Aanvullingsstuk voor volledige bescherming

Het telescopische Venta-zijhek bedekt bijna de hele lange zijde van het bed. Alleen aan het voeteneind is een klein stukje open. Als dit ook gesloten moet worden voor een volledige bescherming, is er optioneel een aanvullingsstuk verkrijgbaar als accessoire. Het vulstuk blijft altijd stevig op zijn plaats zitten en de handgreep biedt extra steun als de bewoner bijvoorbeeld naast het bed staat. Door de fijne constructie laat de hele zijhek een vrij uitzicht toe op de kamer of uit het raam.



De combinatie van blauwe softcovers en het krijtwhite dessin creëert een frisse, positieve sfeer.

▲ Softcovers voor de hoofdborden zijn verkrijgbaar als kussenontwerp (links) of biesontwerp (rechts).



▲ Er zijn zowel neutrale als felle kleuren
▼ verkrijgbaar.



Softcover

Meer kleur en elegantie

Kleur wekt energie en positieve emoties op. Bij oudere en demente patiënten kan het de cognitieve vaardigheden en het **oriëntatievermogen** ondersteunen. Met optionele softcovers voor de hoofdborden en zijpanelen verandert de Venta in een comfortabel **designbed** dat past in elk interieurontwerp en de bewoner een gevoel van veiligheid en herkenning geeft in de kamer.

- 2 vormen naar keuze: kussenontwerp met puntige hoeken, biesontwerp met ronde hoeken
- hoogwaardige stof met aantrekkelijke kleuren en patronen
- softcover voor hoofdborden en zijpanelen afzonderlijk verkrijgbaar en vrij combineerbaar
- moeiteloze bevestiging en verwijdering
- ideaal voor het doorvoeren van kleurconcepten in kamers of afdelingen



▲ De softcovers kunnen snel over de hoofdborden worden getrokken en weer worden verwijderd.

De meeste vlekken kunnen met een borstel verwijderd worden. ▶



BESLIST BETER

Eenvoudige reiniging



Als mensen die zorg nodig hebben een groot deel van hun dag in bed doorbrengen en ook hun maaltijden daar eten, kunnen de softcovers vies worden. De hoogwaardige stof van onze softcovers is hierop voorbereid. Vloeibare en viskeuze stoffen trekken niet in de stof. Ze kunnen snel en grondig worden verwijderd met een borstel, water en schoonmaakmiddel. Ze kunnen niet in de wasmachine gewassen worden.



Verwijderbaar hoofdbord

Voet- en haarverzorging in bed wordt veel eenvoudiger als de verzorger direct aan het voeten- of hoofdeinde kan werken. Ook bij een medisch noodgeval is de **toegang tot de bewoner** van alle kanten handig. Daarom zijn er optionele verwijderbare hoofdborden verkrijgbaar voor de Venta. Ze kunnen zonder **gereedschap** omhoog worden getrokken en weer snel op de bevestigingen worden geschoven.



▲ Indien nodig, kunnen de hoofd- en voetenborden met weinig moeite omhoog worden getrokken en verwijderd.



▲ Met aantrekkelijke dessins kunnen de hoofdborden worden aangepast aan de persoonlijke smaak.



▲ Het lage voetenbord Nobla reha biedt een duidelijk zicht op de kamer of uit het raam.

Hoofdborden en dessins

Gezelligheid voor elke inrichtingsstijl

De huiselijkheid en het individuele ontwerp van de Venta worden ook weer- spiegeld in talrijke selecteerbare hoofdbordvormen en houtdessins. Van recht tot speelse rondingen, **elke stijl** is verkrijgbaar. Hoofdborden met **handgrepen** vergemakkelijken ook het manoeuvreren van het bed en zorgen voor een veilige houvast voor de bewoner. Het assortiment dessins varieert van witte kleikalk tot weelderig donkerbruine Bella Noce-chocolade.


Meer informatie
in onze brochure
“Hoofdborden en
dessins”



Teno



Nobla

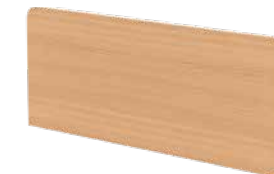


Nobla reha



Alero



Camo

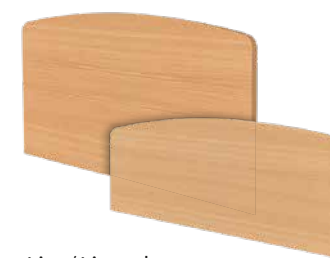


Lito/Lito reha



Pino



Podego

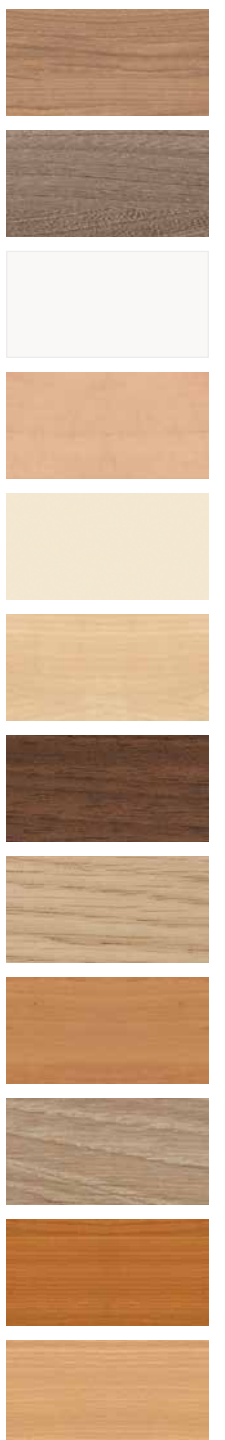

Onderstel met harmonieuze lijnen

Naast de individuele houten ombouw en de softcovers, draagt ook het onderstel bij aan de huiselijkheid van de Venta. De uiteinden van de langsliggers zijn standaard bekleed met **4 individuele kunststof afdekkingen**. De zilvergrijze kleur past precies bij de kleur van het frame. De afdekkingen verbergen enkele mechanische kenmerken voor een meer harmonieuze lijn van het bed. Tegelijkertijd kan het gladde oppervlak hierdoor nog eenvoudiger en **grondiger worden gereinigd**. Indien nodig kunnen de kunststofelementen zonder gereedschap worden verwijderd.

Op verzoek is een nog **uitgebreidere afdekking** verkrijgbaar. De twee kunststof elementen bedekken het volledige oppervlak van het onderstel en zijn verkrijgbaar in de kleuren van verschillende **houtdessins**. Als u alleen het hoofd- of het voeteneinde wilt bedekken, kunt u ook een enkel element kopen. De decoratieve afdekking verbergt de technische aspecten van het verpleegbed en geeft het een zeer persoonlijke uitstraling. Ook is het gemakkelijk schoon te maken en af te nemen.



▲ Standaard omhullen 4 kunststof afdekkingen de uiteinden van de langsliggers.

BESLIST BETER

Aantrekkelijke kleuren om uit te kiezen

	Lindberg Eik
	Eikenstijl kaneel
	Havana-kers
	Naturel beuken
	Krijt
	Zilvergrijs

Ligvlakken

De basis voor een goede nachtrust

Een optimaal ligvlak ondersteunt het effect van de matras en draagt bij aan de goede hygiënische eigenschappen van het verpleegbed. Het standaard **hygiënische ligvlak** van de Venta maakt een bijzonder eenvoudige en grondige verwerking mogelijk. Diepe ventilatiesleuven in het polypropyleen bevorderen een gezond microklimaat in het bed en een goede nachtrust. Alle soorten speciale matrassen kunnen meestal zonder onder matrassen worden geplaatst, zodat de beschermhoogte van het **zijhek** voldoende is.

Voor een bijzonder goede nachtrust en een ideale aanpassing aan de lichaamsvorm is het selecteerbare **comfortmatras** zeer geschikt. Het bestaat uit 30 flexibele draagvlakelementen met 80 zwaaiveren en verschillende hardheden. Het comfortabele ligvlak versterkt de **drukverlichtende functies** van het matras. Het is iets hoger dan bij traditionele modellen, dus u moet controleren of de hoogte van het zijhek in combinatie met uw matras voldoende is.

Bijzonder eenvoudig te reinigen

▼ De ventilatiesleuven in het ligvlak dragen bij aan een gezond microklimaat in het bed.



▼ Het comfort ligvlak



Remmen – gemakkelijk en veilig

De goede rij- en manoeuvreereigenschappen van de Venta worden verbeterd door de **moeiteloos bedienbare remmen**. De verpleger kan zonder problemen met zijn voet remmen, ook als het ligvlak in de laagste stand staat. Bukken en lang zoeken in hectische situaties behoren tot het verleden.

De Venta heeft standaard een gepatenteerde **wielvergrendeling**. Optioneel is een nog comfortabeler centrale wielvergrendeling verkrijgbaar. Voor de modelversies movo en forto is dit laatste al standaard inbegrepen. Vooral de bijzonder mobiele variant Venta movo is dus onmiddellijk klaar om op elk moment te starten en kan veilig worden geremd op de doelpositie met **slechts één voetbeweging**.

▼ Bij de modelvariant movo is de centrale wielvergrendeling standaard inbegrepen.



▼ Ook bij de modelvariant forto kunnen alle vier de wielen met slechts één voetbeweging worden geremd of ontgrendeld.



▲ Gemakkelijk te bereiken op elk moment: het rempedaal van de Venta in de standaarduitvoering met paarsgewijze wielvergrendeling.

▼ Als optie is de Venta ook leverbaar met een praktische centrale rolblokkering.





Bedverlenging

Ruimte en comfort voor lange bewoners

Voldoende ruimte in het verpleegbed is een cruciale voorwaarde voor welzijn. Grote bewoners zullen daarom de **geïntegreerde verlenging** van het bedframe met 20 cm waarderen, die elke Venta standaard heeft. Verzorgers of technici kunnen deze verlenging losmaken van het zijhek. De resulterende opening tussen zijpaneel en voeteneinde heeft geen invloed op de standaardwerking van het bed. Uiteraard zijn er als accessoires telescopische zijpanelen beschikbaar, die zorgen voor een doorlopend elegant uiterlijk.

Om het ligvlak uit te breiden zijn er twee mogelijkheden. De eenvoudigere versie is een **matrasdeel** dat met behulp van een beugel in het bedframe wordt geplaatst en stevig op zijn plaats blijft wanneer het ligvlak wordt versteld. Als de bewoner echter met de benen hoger moet liggen ten behoeve van de gezondheid, dan wordt een **onderbeenverlenging** aanbevolen. Het kan eenvoudig en zonder gereedschap aan het ligvlak worden bevestigd. Een bijpassend matrasdeel kan aan het voeteneinde worden geplaatst of, om drukplekken op de hielen te voorkomen, aan het hoofdeinde. Het gebruik van een 220 cm lang matras is ook mogelijk.

▲ De optionele telescopische zijpanelen kunnen bij gebruik van de bedverlenging ook worden uitgetrokken.

BESLIST BETER

De bedverlenging

- Elke Venta-variant is uitgerust met een verlenging van het bedframe van 20 cm.
- De verlenging kan zonder gereedschap worden verwijderd en standaard zonder verdere wijzigingen worden gebruikt.
- Optionele telescopische zijpanelen sluiten de optische opening aan het voeteneinde.
- Het ligvlak kan worden verlengd met een matrasdeel dat aan het voeteneind wordt geplaatst en niet beweegt tijdens verstellingen.
- Als alternatief is een onderbeenverlenging verkrijgbaar, die meebeweegt en zo de orthopedische positie mogelijk maakt.



Het bedframe is standaard 20 cm uittrekbaar. Het liggedeelte kan optioneel met een matrasdeel (boven) of een verlengstuk voor de onderbeensteun (onder) worden verlengd.

▼ Om de verlenging van het bedframe te activeren, maakt de verpleger eerst de borgpen los.



▼ Daarna kunt u de verlenging moeiteloos uittrekken.



◀ De optionele innovatieve onderbeenverlenging beweegt mee met de verstelling van de onderbeensteun. Zo worden, naast het bedframe ook de beweegbare ligvlakelementen effectief verlengd.



Op de laagste stand is de bewoner beschermd tegen letsel door uit bed vallen zonder dat er vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.

3-stop-functie

Ergonomisch werken en mobiliseren


Afhankelijk van het tijdstip en de activiteit moet een modern verpleegbed zeer **verschillende hoogtestanden** kunnen aannemen. 's Nachts beschermt de laagste stand tegen uit bed vallen, om op te staan of te gaan liggen is een gemiddelde hoogte optimaal en de verzorger spaart zijn rug als het ligoppervlak omhoog wordt gebracht tot heuphoogte. Met het grote hoogteaanpassingsbereik van de Venta van ca. 25 - 80 cm kan elke gewenste hoogte traploos met de handschakelaar worden ingesteld. Voor extra comfort zorgt de 3-stop-functie: Het bed stop niet alleen automatisch in de hoogste en laagste stand staan, maar maakt ook bij ca. 38 cm een **tussenstop**.

- Moeiteloos instellen van de ergonomisch voordeligste stand voor in en uit bed stappen
- Eenvoudigere mobilisatie van bewoners
- De hoogte van de tussenstop kan individueel worden aangepast voor zeer kleine of zeer grote bewoners

◀ De automatische tussenstop op ongeveer 38 cm is ideaal voor eenvoudig in en uit bed stappen. Het zijhek laat voldoende ruimte vrij en dient als ondersteuning voor mobilisatie.



▲ De maximale hoogte van 80 cm maakt het zelfs grote verpleegkundigen mogelijk om rugvriendelijk te werken in een rechte houding.

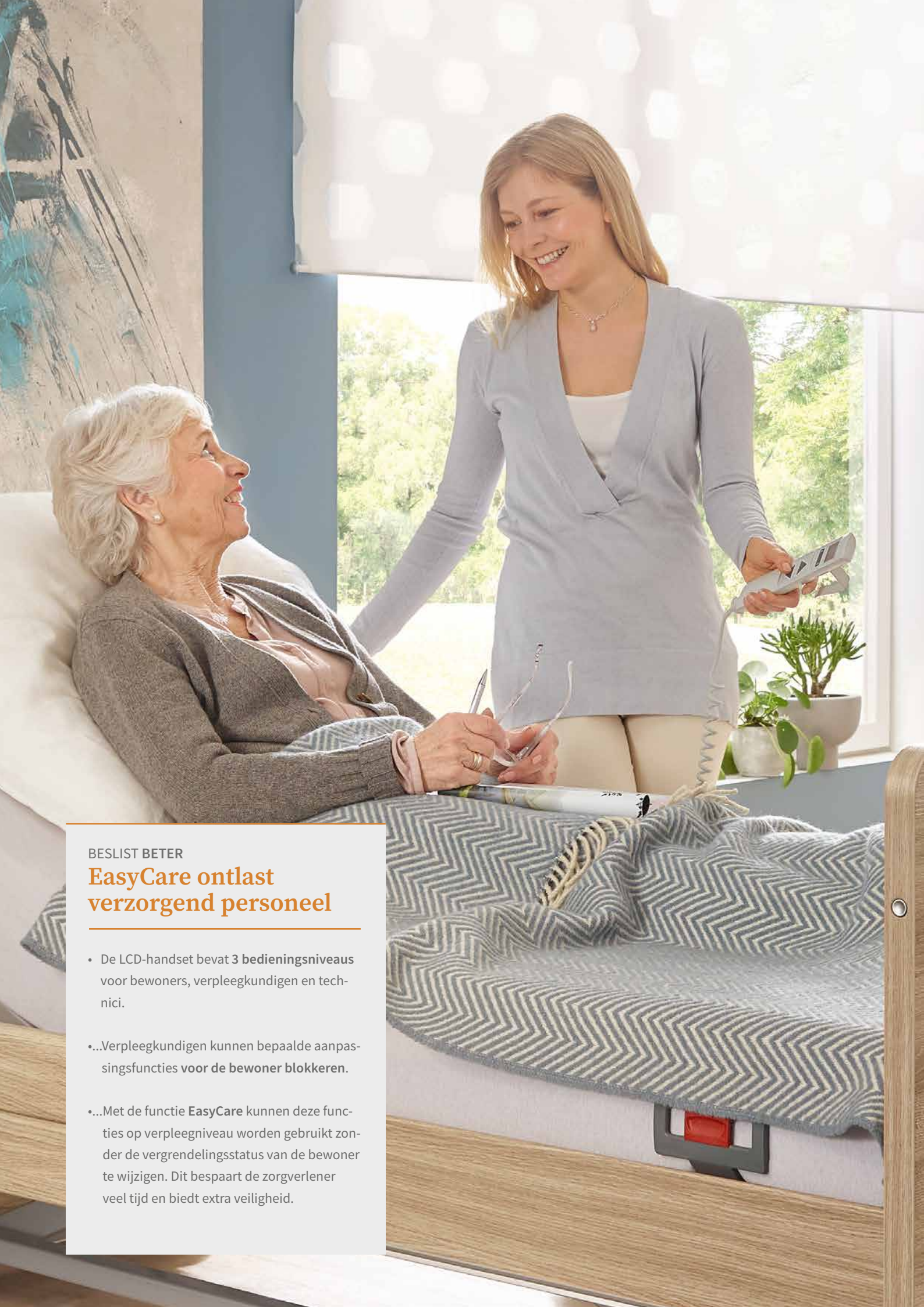

BESLIST BETER

EasyCare ontlast verzorgend personeel

- De LCD-handset bevat 3 bedieningsniveaus voor bewoners, verpleegkundigen en technici.
- ...Verpleegkundigen kunnen bepaalde aanpassingsfuncties voor de bewoner blokkeren.
- ...Met de functie EasyCare kunnen deze functies op verpleegniveau worden gebruikt zonder de vergrendelingsstatus van de bewoner te wijzigen. Dit bespaart de zorgverlener veel tijd en biedt extra veiligheid.



Met de LCD-handset kunnen alle gebruikers van het bed optimaal werken met slechts 3 knoppen en een display met achtergrondverlichting.



▲ De standaardhandschakelaar geeft de aanpassingsfuncties weer met behulp van intuïtieve pictogrammen.

Innovatief bedieningsconcept

Handschakelaar voor individuele vereisten

De bediening van de Venta gebeurt met een individueel selecteerbare handset. De comfortabele variant is de optionele **LCD-handshakelaar** met slechts 3 knoppen, EasyCare en een verlicht display. De schakelaar heeft 3 niveaus voor bewoners, verpleegkundigen en technisch personeel die met behulp van een ontgrendelingsmagneet eenvoudig op het bed gewisseld kunnen worden.

De **standaardhandschakelaar** toont alle instelmogelijkheden van het bed aan de hand van eenvoudige pictogrammen. De rijen toetsen kunnen selectief worden vergrendeld. Voor de snelle instelling van de Trendelenburg-positie staat een aparte **Trendelenburg-handschakelaar** ter beschikking zodat de bewoners deze functie niet met de voetpositie kunnen verwarren.



▲ Trendelenburg-handschakelaar




Als de bewoner opstaat, informeert het systeem het verplegend personeel met een lichtsignaal in de vloer of een geluidssignaal in de dienstkamer.

e-help

Digitale assistentiesystemen

Digitale ondersteuningssystemen zijn een moderne oplossing om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen, bewoners te beschermen en tegelijkertijd zorgverleners te ondersteunen, vooral tijdens de nachtdienst. Stiegmeyer blijft deze systemen ontwikkelen onder de naam "e-help".

De nadruk ligt op het **out-of-bed-systeem**. Een belastingssensor in de rugleuning registreert het als de bewoner opstaat. Het systeem kan optioneel een bedlampje of het leeslampje direct inschakelen voor een betere oriëntatie in het donker. Na een ingestelde tijdsinterval wordt de verpleegkundige geïnformeerd via de bestaande oproepsysteem.

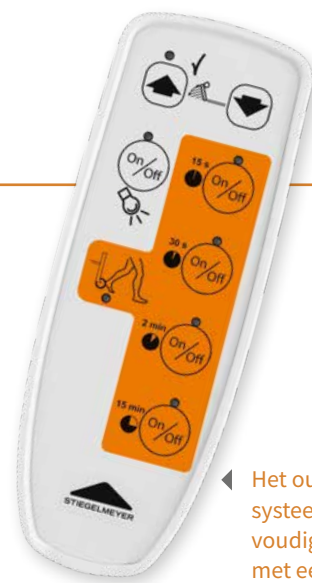

Het out-of-bed-systeem is zeer eenvoudig te bedienen met een handschakelaar.

BESLIST BETER

Het out-of-bed-systeem



De bewoner verlaat zijn bed en er wordt een melding verstuurd

- Oriëntatie door optioneel onderbedlicht
- Aanzienlijk gereduceerd risico op vallen zonder fixaties
- De verzorger wordt na een vaste tijdsinterval tussen 15 seconden en 15 minuten geïnformeerd, dus geen vals alarm direct na het opstaan
- Snelle ondersteuning voor bewoners die een hoog risico lopen om te vallen



Zichtbaarheid in de verpleegkamer



Zichtbaarheid in de vloer



Er wordt een zichtbare en hoorbare melding gegeven in de ruimte van de verpleegkundigen



▲ Bij het 24-volt-systeem zorgt een transformator voor een beschermende extra lage spanning.



Voor het 230 Volt-systeem zijn er 6 soorten voedingsconnectoren die aan verschillende internationale normen voldoen.

Zuinig en veilig

Moderne aandrijfsystemen

Hoge beveiliging, aanzienlijk lagere energiekosten en werking met weinig inspanning: het optionele 24 volt-systeem is een aantrekkelijke keuze voor de Venta.

Direct bij het stopcontact zorgt een transformator voor een **beschermende laagspanning** van 24 volt. Er bevindt zich geen 230 volt-onderdeel dichtbij de patiënt waardoor dit veiliger is.

Het elektriciteitsverbruik daalt tot 93%. Voor gebruik van het 24 volt-systeem met internationale stroomstekkers is een op de grond gemonteerde voeding beschikbaar.

Standaard is de Venta uitgerust met een betrouwbaar **230 volt-aandrijfsysteem**. Met geschikte selecteerbare stroomstekkers is het dus internationaal klaar voor gebruik waar nodig.

BESLIST BETER


Overal geschikt



Het 230 Volt-aandrijfsysteem is verkrijgbaar met bijpassende stekkers voor veel internationale markten.

BESLIST BETER

Sterke voordelen

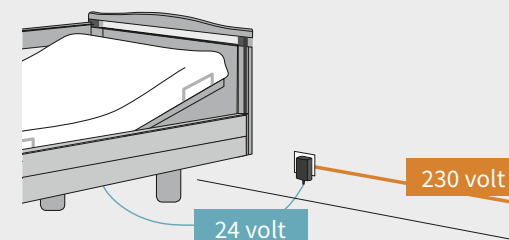

- Veilige laagspanning vanaf de transformator in het stopcontact
- Geen 230 volt-componenten aan het bed
- de optioneel verkrijgbare oplaadbare batterij maakt het verpleegbed onafhankelijk van de netspanning in geval van nood



Toebehoren

Zo wordt de Venta een droombed

Optionele bekleding en hoezen aan de zijkanten van het bed beschermen de bewoner, maken het in en uit bed stappen gemakkelijker en geven een aangenaam idee van veiligheid door hun aangenaam zachte gevoel.

Het afdekken van het zijhek voorkomt dat rusteloze bewoners tegen de spijlen stoten of ertussen door grijpen. De **schuimleren bekleding** bedekt het zijhek volledig van binnen en buiten. Er zijn passende lengtes voor het hoofdeinde en het volledig uitgetrokken zijhek verkrijgbaar. De **bevestigbare beschermkussens** bedekken de binnenkant van het zijhek met 20 mm dik schuim. De bewoner geniet maximale bescherming. De bekleding kan veilig worden vastgemaakt met klittenband. Ze zijn beschikbaar voor het hoofd- en voeteneinde van het zijhek.

Om het voor de bewoner gemakkelijker te maken om in en uit bed te stappen, kunnen er **opvulkussens** in verschillende vormen op het vrije gedeelte van de bedzijde worden geplaatst. Ze vergroten het zitvlak van het bed.



▲ De schuimleren bekleding bestaat uit hoogwaardig, desinfecteerbaar kunstleer en schuim.



▲ De opvulkussens vereenvoudigen het in en uit bed stappen.



▲ De hoge versie van het opvulkussen beschermt ook het zijpaneel.



▲ Het beschermkussen kan eenvoudig van binnenuit op het zijhek worden geplaatst.



▼ De wandafstandhouder met plaat is ideaal voor lichte wanden.



▲ De Sola-leeslamp geeft een aangenaam licht zonder sterke warmteontwikkeling.



▲ De oprichter maakt een comfortabele positionering in bed mogelijk.

Andere producten vindt u in onze
accessoire brochure


Met originele accessoires van Stieglmeyer kan de Venta nog beter worden aangepast aan individuele behoeften. Praktische details zoals **wandstootrollen** en **wandafstandhouders** beschermen het bed en de kamerinrichting tegen schade door botsen. Onze **leeslampen** bieden gezellig licht met weinig warmteontwikkeling. De **tijdschrijthouder** en het opklapbare **schrijfbord** kunnen aan het hoofdbord worden bevestigd en helpen bij het documenteren van de zorgverlening. Dit maakt van elke Venta een op maat gemaakt bed.

◀ De elegante leeslamp Stella biedt aangenaam licht.

BESLIST BETER

De afstandshouder

- Afstandshouders voor muren voorkomen botsing met de inrichting en stopcontacten tijdens het manoeuvreren van het bed

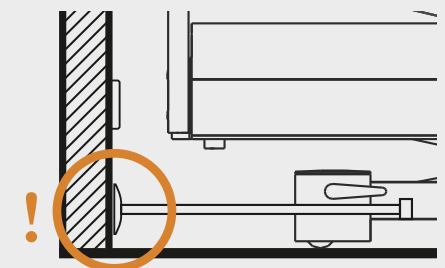

- Veel verschillende modellen naar keuze
- Buffer vangt botsingsenergie op
- Optionele plaat verdeelt de druk nog gelijkmatiger – ideaal voor lichte wanden
- Passende afmetingen voor uw bed

Uitrustingen en opties

Modelvarianten	Venta – Standard	Venta – Variant movo	Venta – Variant forto
Afmetingen en gewichten			
Buitenmaat (afhankelijk van de houten ombouw)	bij een ligvlakbreedte van 90 cm ca. 104 x 211 cm	bij een ligvlakbreedte van 90 cm ca. 104 x 211 cm	bij een ligvlakbreedte van 100 cm ca. 114 x 211 cm
Ligvlak (matrasmaat)	90 × 200 cm of 100 × 200 cm	90 × 200 cm of 100 × 200 cm	100 × 200 cm
Ligvlakopdeling (RL/zitgedeelte/OL/UL)	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm	ca. 85 / 15 / 40 / 60 cm
Lengteaanpassing van de rugsteun	ca. 10 cm	ca. 10 cm	ca. 10 cm
Veilige werklust	225 kg	225 kg	260 kg
Onderrijdbaarheid	ca. 15 cm	ca. 15 cm	ca. 15 cm
Totaal gewicht	ca. 153 kg	ca. 153 kg	ca. 151 kg
Aandrijvingen			
Volledig gemotoriseerd	✓	✓	✓
Volledig gemotoriseerde OpenBus-technologie	✓	✓	✓
24-volt aandrijfsysteem met externe transformator	0	0	0
Elektronische componenten			
Handbediening (selectief blokkeerbaar)	✓	✓	✓
LCD-handbediening	0	0	0
Out-of-bed-systeem	0	0	0
Handbediening voor kanteling aan hoofdeinde (Trendelenburg)	0	0	0
Zijheksystemen			
Kantelbaar zijhek	✓	✓	✓
Kantelbaar zijhek incl. horizontale telescoop	0	0	0
Kiervulling	0	0	0
Vergrendeling in de onderste stand	0	0	0
Hoogte zijhek	42 cm	42 cm	42 cm
Ligvlakken			
Hygiënisch ligvlak	✓	✓	✓
Comfort-ligvlak (niet bij ligvlak 100 cm)	0	0	–
Ligvlakbreedte 100 cm	0	0	✓
Ligvlak in vieren gedeeld	✓	✓	✓
Ligvlak in lage voetpositie kantelbaar	✓	✓	✓
Ligvlak in lage hoofdpositie kantelbaar	0	0	0

Modelvarianten	Venta – Standard	Venta – Variant movo	Venta – Variant forto
Wielen			
Wielen ø 125 mm	–	–	✓
Dubbele wielen ø 100 mm	–	✓	–
Dubbele wielen ø 50 mm	✓	–	–
Centrale 4-wielenvastzetting	0	✓	✓
2 × 2-wielenvastzetting	✓	–	–
Wandstootrollensysteem			
Wandstootrollen in horizontale richting	0	0	0
Wandstootrollen in horizontale en verticale richting	0	0	0
Wandafstandhouders op het onderstel	0	0	0
Overige			
Softcover	0	0	0
Onderrijdbaarheid voor hefapparaat	✓	✓	✓
Bevestigingshulzen hoofdeinde	✓	✓	✓
Bevestigingshulzen voeteneinde	0	0	0
Telescopische zijpanelen	0	0	0
Dekendrager	0	0	0
Geïntegreerde bedverlenging (20 cm) zonder gereedschap uittrekbaar	✓	✓	✓
Onderbeensteunverlenging	0	0	0



BESLIST BETER Venta-serie – de veiligheidsnormen

- EN 14971
Risicoanalyse voor Medische Hulpmiddelen
- EN 60601-1
Veiligheid voor medische elektrische apparaten
- EN 60601-1-1
Elektromagnetische compatibiliteit
- DIN EN 60601-2-52
Medische elektrische apparaten

✓ = Standaarduitrusting
0 = Optioneel verkrijgbaar
– = Niet leverbaar

Behouder van waarden Vormgever van de toekomst

STIEGELMEYERGROUP

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaardige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, is voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfort bedden

Projectmeubelen

Service



De Stiegmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken





STIEGELMEYERGROUP

Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

8 Allée des Chevreuils

69380 Lissieu

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

Fax +33 (0) 4 7238 - 5481

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl



Vind uw plaatselijke partner op onze website:

Find your local partner at our website:

stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com