

BESLIST BETER



Deka

Het veelzijdige platform
voor alle vereisten

Deka

Eén bed voor elke behoefte

De Deka van Stiegmeyer is veel meer dan een model eenpersoonsbed. De naam Deka staat voor een platform met verschillende uitvoeringsvarianten en afmetingen. Elke instelling kan uit het aanbod een ziekenhuisbed samenstellen dat tot in het kleinste detail voldoet aan de medische en economische eisen. Alle varianten overtuigen met de felbegeerde Stiegmeyer-kwaliteit en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Ze bieden een consistent ontwerpconcept, dat veel ruimte biedt voor persoonlijke wensen met selecteerbare hoofdborden en patronen. Hierdoor past het bed functioneel en esthetisch op elke afdeling. Dankzij het eenvoudige ontwerp is de Deka ook gemakkelijk en grondig te reinigen. De machinaal wasbare variant ondersteunt op efficiënte wijze klinieken tegen multiresistente ziekteverwekkers.

Afhankelijk van de eisen is de Deka als mechanische of verschillende gemotoriseerde versies verkrijgbaar. Hiermee worden de specifieke behoeften van de psychiatrie en de klassieke verpleging afgedekt. Alle modellen zijn gemakkelijk te manoeuvreren, ook in kleine ruimtes. Optioneel is daar een 5de wiel voor verkrijgbaar. Als er ruimte moet worden bespaard, wordt in plaats van een matrasbreedte van 90 cm een smallere variant van 80 cm aanbevolen. Naast de vele uitrustingsopties kan elke Deka met originele accessoires van Stiegmeyer worden omgetoverd tot een individueel droombed. Lees op de volgende pagina's meer over de vele mogelijkheden van het Deka-platform.

Contents

4 Modelvarianten

10 Uitvoeringen en opties

14 Technische gegevens

14 Dessins

15 De Stiegmeyer-groep

BESLIST BETER

Voordelen voor alle gebruikers

Verplegend personeel

- ergonomisch werken op heuphoogte
- rugontlastende verstelling van de mechanische variant
- moeiteloze bediening van het ¾-zijhek
- goede verrijdbaarheid

Technici

- robuust, onderhoudsvriendelijk ontwerp
- hoge bescherming tegen beschadiging door goede manoeuvreerbaarheid en wandstootrollen
- uitstekende hygiënische eigenschappen van de oppervlakken van het bed

Patiënten

- comfortabel ligvlak met verstelbare rugleuning
- intuïtieve bediening van de motormodellen met handschakelaar
- aantrekkelijk ontwerp



Deka
90 breed
Het basismodel

- **Hoogteverstelling:**
43 tot 83 cm
- **Het praktische bed:**
 - Ligvlak 90 x 200 cm
 - Buitenafmetingen met zijhek 102,5 x 213 cm
 - 4-delig ligvlak
 - optioneel 5de wiel maakt een betere wendbaarheid mogelijk

Pagina 4 - 7



Deka
80 breed
Het smalle bed

- **Hoogteverstelling:**
43 tot 83 cm
- **Het moeiteloos verplaatsbare bed**
 - Ligvlak 80 x 200 cm
 - Buitenafmetingen met zijhek 92,5 x 213 cm voor smalle deuren en gangen
 - Optioneel 5de wiel maakt een betere wendbaarheid mogelijk

Pagina 4 - 7



Deka
vaste hoogte
Betrouwbare basisfunctie

- **Ligvlakhoogte:**
ca. 50 tot 55 cm
- **Het robuuste bed:**
 - Ligvlak 90 x 200 cm
 - Buitenafmetingen met zijhek 102,5 x 213 cm
 - Bijzonder onderhoudsvriendelijk

Pagina 8



Deka
Psychiatrie-varianten
Speciale bedden voor de psychiatrie

- **Hoogteverstelling:**
43 tot 83 cm
- **Het bed voor speciale vereisten:**
 - Ligvlak 90 x 200 cm
 - Speciaal beveiligde elementen
 - Variant zonder hoogteverstelling naar keuze

Pagina 9



In de afwasbare versie zijn de zijhekken voorzien van extra randbeveiliging.


Deka

Motorvarianten


De elektrisch verstelbare varianten van de Deka bieden veel comfort en veiligheid in de kliniek. Ook hier is er een ruime keuze: opties zijn een enkele motor voor de rugsteun, 2 motoren voor de rugsteun en hoogteverstelling en de 3-motorige variant, waarbij nog een motor voor de beweging van de bovenbeensteun is toegevoegd.

- Moeiteloos opklapbaar ¾-zijhek met een hoogte van 41 cm
- Achteraf monteerbaar doorlopend zijhek verkrijgbaar voor bedden zonder zijhek
- 2 handschakelaarmodellen met verschillende methoden om functies te blokkeren

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 90 breed:

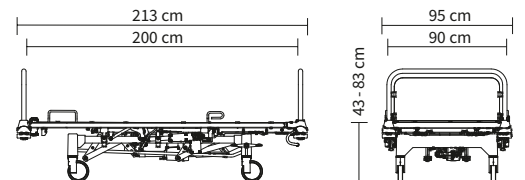

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 80 breed:

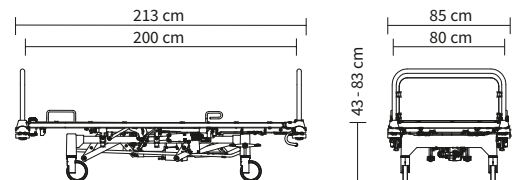

- ▲ Trendelenburgpositie en anti-Trendelenburgpositie kunnen snel en veilig met een hendel geactiveerd worden.
- ◀ De pictogramknoppen spreken voor zich en zijn intuïtief voor de patiënt.



- ▲ Met de handschakelaar kan het verplegend personeel de functies van het bed vergrendelen en ontgrendelen.



- ▲ Met de handbediende handschakelaar worden de afzonderlijke functiegroepen geblokkeerd of vrijgegeven door middel van een schakelkast in de dekendrager.

Trendelenburg-positie

Anti-Trendelenburg-positie

Machinale wasbaarheid

5de zwenkwiel

Bedverlenging

Duitse techniek




Deka

Mechanische varianten


Elektriciteit brengt kosten met zich mee en is niet altijd beschikbaar op de gewenste locatie. De mechanische uitvoering van de Deka maakt de exploitant onafhankelijk van het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd kan het bed bijna inspanningsloos uitgebreid worden veresteld, zodat comfortabel liggen van de patiënt en ergonomisch werken door het verzorgend personeel op heuphoogte gemakkelijk mogelijk zijn.

- Rugvriendelijke hoogteverstelling door gebruikmaking van het hydraulische pomppedaal
- Ligvlak blijft tijdens de verticale verstelling in zijn baan
- Moeiteloos opklapbaar $\frac{3}{4}$ -zijdig met een hoogte van 41 cm

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 90 breed:

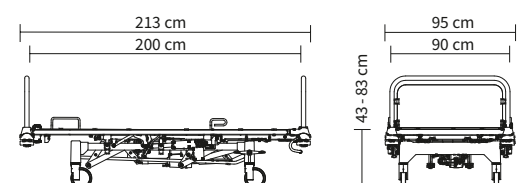

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik 80 breed:

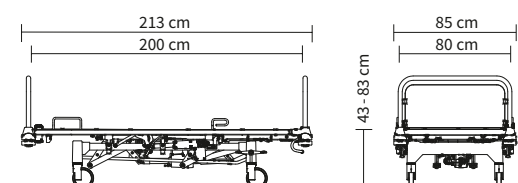

- ▲ De rugsteun van de Deka kan met behulp van een handgreep eenvoudig worden veresteld door het verplegend personeel.



- ▲ Het bed is standaard uitgerust met een in de breedte verstelbare rugsteun zodat de patiënt geen oncomfortabele dwarskrachten voelt.



- ▲ De Deka biedt zowel een comfortabele anti-Trendelenburgpositie als een Trendelenburg-positie voor noodgevallen. Beide worden altijd mechanisch ingesteld met behulp van een hendel aan het voeteneind.



- ▲ De Deka heeft een groot hoogteverstelbereik van 43 tot 83 cm en kan met een pedaal snel door het verzorgend personeel worden ingesteld.

Geen rugbelastende
hoogteverstelling
met de hand





Deka zonder hoogteverstelling


betrouwbare basisfunctie

Op sommige medische gebieden hoeft een ziekenhuisbed slechts basisfuncties te vervullen: het moet veilig, duurzaam en hygiënisch zijn en gemakkelijk te hanteren. De mechanische Deka zonder hoogteverstelling is ideaal voor een dergelijke basisfunctie. Dit model wordt geleverd met een hoogte van 55 cm – een goed compromis tussen een prettige uitstaphoogte en ergonomisch werken.

De Deka zonder hoogteverstelling scoort met een uitstekende prijs-prestatieverhouding en ontziet het budget:

- bijzonder robuust en onderhoudsvriendelijk
- goede hygiënische eigenschappen
- gemakkelijk te bedienen onrusthekkers

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

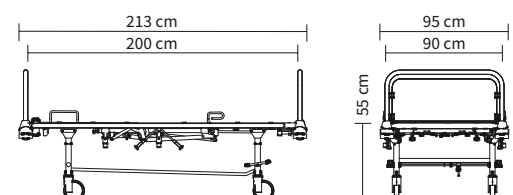


Deka

voor psychiatrische instellingen



Op psychiatrische afdelingen hebben onrustige patiënten soms speciale bescherming nodig. Het moet zo veel mogelijk worden uitgesloten dat ze het bed beschadigen en zichzelf of zorgverleners verwonden met de onderdelen. Onze speciaal voor de psychiatrie ontworpen Deka stelt op dit gebied een hoge veiligheidsnorm en biedt een hoog comfort.

Zie voor meer informatie over de psychiatrische versies van de Deka onze aparte brochure over psychiatrische bedden.

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

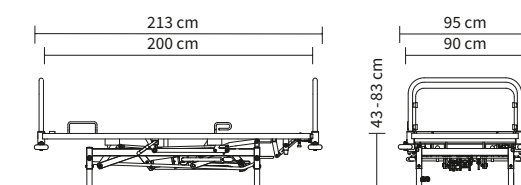

▼ Mocht een fixatie van de patiënt onvermijdelijk zijn, dan bieden de rugsteun en spanrails extra aansluitpunten voor riemen.

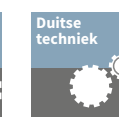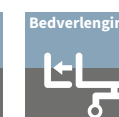

Uitvoeringen en opties

Hoofd- en voeteneinde

	Design Valero • Modern design • Met robuuste profielen (zijkant roestvrij staal, bovenkant staal)	• Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar • Dessins uit Stiegmeyer-Resopal-collectie
	Design Classic • Klassiek ontwerp • Met robuuste stalen profielen	• Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar • Dessins uit Stiegmeyer-Resopal-collectie

Ligvlakken

	Bodem met stalen rooster • Materiaal staal • Bijzonder robuust en duurzaam
	Stalen roosterbodem verwijderbaar • Materiaal staal • Bijzonder robuust en duurzaam • Apart verwijderbare elementen
	Hygiënisch ligvlak • Materiaal polypropyleen • Apart verwijderbare elementen • Optioneel met uitsparingen voor gordelsysteem
	Röntgendoorlaatbare rugsteun • Optioneel voor stalen roosterbodem en hygiëne-ligvlak • Materiaal kunststof (HPL)
	2-delig ligvlak • Verstelbare rugsteun
	4-delig ligvlak - Verstelbare rugsteun en bovenbeensteun

Wielen

	Standaardwiel • Ø 125 mm
	Coverrol • Ø 125 mm

	Dubbele loopwielen • Ø 150 mm
	Integraal wiel • Ø 150 mm
	5de wiel • Ø 125 mm • Voor nauwkeurig manoeuvreren in kleine ruimtes

Stootrollen

	Kunststoff • Ø 100 mm • Materiaal: Polyamide (PA6) • inclusief stootkegel
	Universeel • Ø 100 mm • Verticaal en horizontaal werkend • Materiaal: polyamide (PA6), polypropylen (PP), TPE • Inclusief stootkegel

Extra voorzieningen

	Bedverlenging • Verlenging van het ligvlak met 20 cm • Aan een handgreep uittrekbaar
	Dekendrager • Opbergmogelijkheid bij het opmaken van het bed • Eenvoudig uittrekbaar aan het voeteneinde
	Bevestigingshulzen • Geplaatst aan het hoofdeinde voor ronde- of ovale oprichters en infuusstandaard
	Bevestigingshulzen voor bedden met bedverlenging • Geplaatst aan het voeteneinde • Bieden ruimte voor infuusstandaarden
	Onderstelafdekking • Beschermt de wielopeningen aan het hoofd- en voeteneinde tegen vervuiling

Uitvoeringen en opties

Deka	90 breed	80 breed	Deka vaste hoogte
Zijhekken			
Zonder zijhek	√	√	√
¾-zijhek*	o	o	o
¾-zijhek met extra wandstootrol*	o	o	o
Verstelmogelijkheden			
Zonder hoogteverstelling, zonder kantelen, mechanische rugsteun	–	–	√
Zonder hoogteverstelling, zonder kantelen, mechanische rug- en bovenbeensteun	–	–	o
Hoogteverstelling, rugsteun, bovenbeensteun en kantelen mechanisch	√	√	–
Gemotoriseerde rugsteun, hoogteverstelling, bovenbeensteun en kantelen mechanisch	o	o	–
Hoogteverstelling en gemotoriseerde rugsteun, bovenbeensteun en kantelen mechanisch	o	o	–
Gemotoriseerde hoogteverstelling, rugsteun en bovenbeensteun, kantelen mechanisch	o	o	–
Pomppedaal voor hydraulische hoogteverstelling**			
Rechts	√	√	–
Rechts en links	o	o	–
Elektronische componenten**			
Handschakelaar (met blokkeerfunctie)	o	o	–
Handschakelaar en schakelkast	o	o	–
Accu	o	o	–
Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde			
Classic	√	√	√
Valero gelakt	o	–	o
Valero verchromd, spijlen roestvrij	o	–	o
Vast hoofdeinde en voeteneinde	o	o	o
Basiskleuren			
Kristalwit vergelijkbaar met NCS SO500N	√	√	√
Argentum, vergelijkbaar met RAL 9006	o	o	o
Ontsmetting, beschermingsklasse			
Handmatige verwerking, IPX6	√	√	√
Machinale verwerking, IPX6W	o	o	–
Ligvlakken			
Stalen roosterbodem vastgelast	√	√	√
Stalen roosterbodem verwijderbaar	o	o	o
Hygiënisch ligvlak	o	o	o
Röntgendoorlaatbare rugsteun	o	o	–
2-delig	–	–	√
4-delig	√	√	o

Deka	90 breed	80 breed	Deka vaste hoogte
Wandstootrollen met stootkegel			
4 standaard, rondom	√	√	√
4 universeel, rondom	o	o	o
2 universeel hoofdeinde, 2 standaard voeteneinde	o	o	o
Wielen			
Standaardwiel, afzonderlijk rembaar, Ø 125 mm	√	√	√
Coverwiel Ø 125 mm	o	o	o
Integraal wiel Ø 150 mm	o	o	o
Dubbel wiel Ø 150 mm	o	o	o
5de wiel			
Dubbel wiel Ø 125 mm	o	o	o
Geleidende wielenset			
1 wiel	√	√	√
2 wielen	o	o	o
4 wielen	o	o	o
Rempedaal			
Kunststof met kleuraanduiding	√	√	√
Gegoten, verchromd	o	o	o
Posities vaste wielen			
Hoofdzijde rechts	√	√	√
Hoofdzijde links	o	o	o
Voeteneinde rechts	o	o	o
Voeteneinde links	o	o	o
Bedmidden (5 ^{de} wiel)**	o	o	–
Extra voorzieningen			
Onderstelafdekking	o	o	–
Bedverlenging	o	o	–
Dekendrager	o	o	o
5de wiel**	o	o	–

Technische gegevens

Deka	90 breed	80 breed	Deka vaste hoogte
Afmetingen en gewichten			
Buitenafmetingen zonder zijhek	95 x 213 cm	85 x 213 cm	95 x 213 cm
Buitenafmetingen met zijhek	102,5 x 213 cm	92,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Ligvlak (matrasmaat)	90 x 200 cm	80 x 200 cm	90 x 200 cm
Bedverlenging	20 cm	20 cm	–
Ligvlakopdeling	ca. 80 – 20 – 35 – 56 cm	ca. 80 – 20 – 35 – 56 cm	ca. 80 – 20 – 35 – 56 cm
Lengteaanpassing van de rugsteun**	8 cm	8 cm	–
Veilige werklast	225 kg	225 kg	225 kg
Maximaal gewicht patiënt	ca. 185 – 215 kg	ca. 185 – 215 kg	ca. 185 – 215 kg
Bodemvrijheid onderstel	ca. 15 cm	ca. 15 cm	ca. 17,5 cm
Totaal gewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg	ca. 90 kg
Beschermhoogte van de ¼-zijhekken	41 cm	41 cm	41 cm
Verstelbereiken			
Kanteling in Trendelenburg-positie**	16°	16°	–
Kanteling in anti-Trendelenburg-positie**	18°	18°	–
Ligvlakhoogte	ca. 43 – 83 cm	ca. 43 – 83 cm	ca. 50/55 cm
Hoek rugsteun	tot ca. 70°	tot ca. 70°	tot ca. 70°
Hoek bovenbeensteun	tot ca. 85° (mechanische uitvoering) tot ca. 35° (elektromot. uitvoering)		tot ca. 85°

Dessins



Behouder van waarden Vormgever van de toekomst

STIEGMEYERGROUP

Behouder van waarden

Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds een familiebedrijf. Respect en verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, medewerkers en partners vormen de basis van ons dagelijks werk. Op basis van deze waarden en onze jarenlange ervaring bieden wij onze klanten over de hele wereld hoogwaardige producten, oplossingen en diensten voor de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle veranderingen in de zorg- en gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze producten allemaal zelf. Innovaties en visies op de zorg voor de toekomst zijn het doel van ons werk. Wij staan altijd in contact met onze klanten om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van de trends van morgen naar het heden, is voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubelen

Service



De Stiegmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen.

- Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit
- Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd
- Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken
- Productontwikkeling en productie in Duitsland
- Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
- Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
- Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zuid-Afrika

Onze merken





STIEGELMEYERGROUP

Hoofdkantoor / Headquarters

Deutschland / Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42

32051 Herford

Phone +49 (0) 5221 185 - 0

Fax +49 (0) 5221 185 - 252

info@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

8 Allée des Chevreuils

69380 Lissieu

Phone +33 (0) 4 7238 - 5336

Fax +33 (0) 4 7238 - 5481

contact@stieglmeyer.fr

www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City

Cape Town, 7441

Phone +27 (0) 21 555 - 1415

Fax +27 (0) 21 555 - 0639

info.southafrica@stieglmeyer.com

www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7

6662 WB Elst

Phone +31 (0) 345 581 - 881

info@stieglmeyer.nl

www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Phone +358 (0) 3 7536 - 320

Fax +358 (0) 3 7536 - 330

stieglmeyer@stieglmeyer.fi

www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno

Grubno 63

Phone +48 56 6771 - 400

Fax +48 56 6771 - 410

info.stolno@stieglmeyer.pl

www.stieglmeyer.pl



Vind uw plaatselijke partner op onze website:

Find your local partner at our website:

stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com