

Evario



Clinic | Care | Homecare | Assist



Het
Ziekenhuisbed
voor alle afdelingen





Inhoud



06 Het modulair systeem



08 Een overzicht van de productkenmerken



10 Zijhekbescherming



12 Intuïtieve bediening



14 Geïntegreerd bedieningspaneel



16 Digitale assistentiesystemen



18 Absolute hygiëne



20 Ontlasting voor de verpleegkundigen



22 Comfort en veiligheid voor de patiënten



24 Economische voordelen voor de exploitant



26 Stiegmeyer – Gegevens en feiten




27 Technische gegevens en opties



Evario – het modulair systeem dat beantwoordt aan hoge eisen

Ziekenhuisbedden moeten aan een waaier van eisen voldoen. De doeleinden op de diverse afdelingen van een ziekenhuis zijn zo verschillend dat het inzetten van meerdere speciale modellen noodzakelijk lijkt. Toch zou het veel makkelijker, gebruiksvriendelijker en economischer zijn als één model **aan alle eisen** zou beantwoorden. Het model Evario van Stiegmeyer biedt hierbij de oplossing.

Dankzij het intelligent modulair systeem is Evario voor alle afdelingen geschikt. Met diverse bedienings-opties, zijhekbescherming, rol- en hoofdsteunen is dit een functioneel en esthetisch **flexibel ziekenhuis-bed** dat voldoet aan individuele behoeften en daarnaast een goede verhouding prijs-kwaliteit biedt.

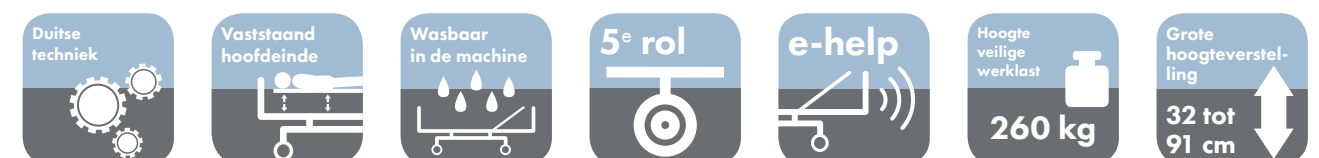

Evario is geschikt voor de algemene verpleging, voor **intensieve zorgen** en draagt bij aan een **snel herstel**. Met zijn hoog comfort en aantrekkelijke esthetiek is dit bed ideaal voor exclusieve kamers. Dankzij de verschillende dessins en vormen zijn er tal van combinaties mogelijk, van **comfortabele elegantie** tot **moderne functionaliteit**.

Met zijn gebruik karakter zorgt Evario voor een aanzienlijke ontlasting voor de verpleegkundigen. Tegelijkertijd dragen het vlakke design en de optimale machinewasbaarheid bij tot **uitstekende hygiëne-eigenschappen**. Dit helpt ziekenhuizen ziekte-verwekkers tegen te gaan.

LCD-handbediening

De LCD-handbediening is intuïtief bedienbaar met slechts 3 toetsen. Er zijn 3 bedieningsniveaus; voor patiënten, verpleegkundigen en technisch personeel.

Geïntegreerd bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dat aan beide zijden van de Protega-zijhekbescherming geïntegreerd is, biedt aan de buiten- en binnenkant pasklare opties voor alle gebruikers alsook praktische voorgeprogrammeerde bedposities.

Veilige bevestiging

De handgrepen aan de hoofd- en zijsteunen zorgen voor houvast voor de patiënt wanneer deze aan het bed staat. Ook vergemakkelijken deze het verplaatsen van het bed.

Rugleuning verstelbaar in de breedte

De rugleuning die in de breedte verstelbaar is, beschermt de patiënten tijdens het verstellen van het bed tegen onaangename zijdelingse stoten en draagt bij tot de decubituspreventie.

Hygiënische ligvlakken

De 4-delige ligvlakken naar keuze bieden een hoog comfort en zijn makkelijk te reinigen en te desinfecteren - ook in de machine.

Welgevormde, praktische hoofdsteunen

Beide hoofdsteunen naar keuze, Intercontinental en Stelo, zijn makkelijk te reinigen. Indien gewenst, kan het bed met een vaststaand hoofdeinde geleverd worden, dat niet meebeweegt wanneer het bed in hoogte versteld wordt.

Bescherming tegen botsen

Stootkegels en een waaier van efficiënte stootrollen beschermen het bed en de kamerinrichting tegen beschadigingen.

Protega zijhekbescherming


De gedeelde zijhekbescherming volgt aan de hoofdzijde de verstelling van het ligvlak en biedt met een hoogte van ca. 41 cm een optimale bescherming.

Grote hoogteverstelling

De hoogteverstelling van 32 cm tot 91 cm beschermt de patiënten tegen vallen en zorgt voor een goede werkhouding voor de verpleegkundige.

5^e rol

De optionele 5^{de} rol vergemakkelijkt het manoeuvreren in smalle ruimtes en gangen.

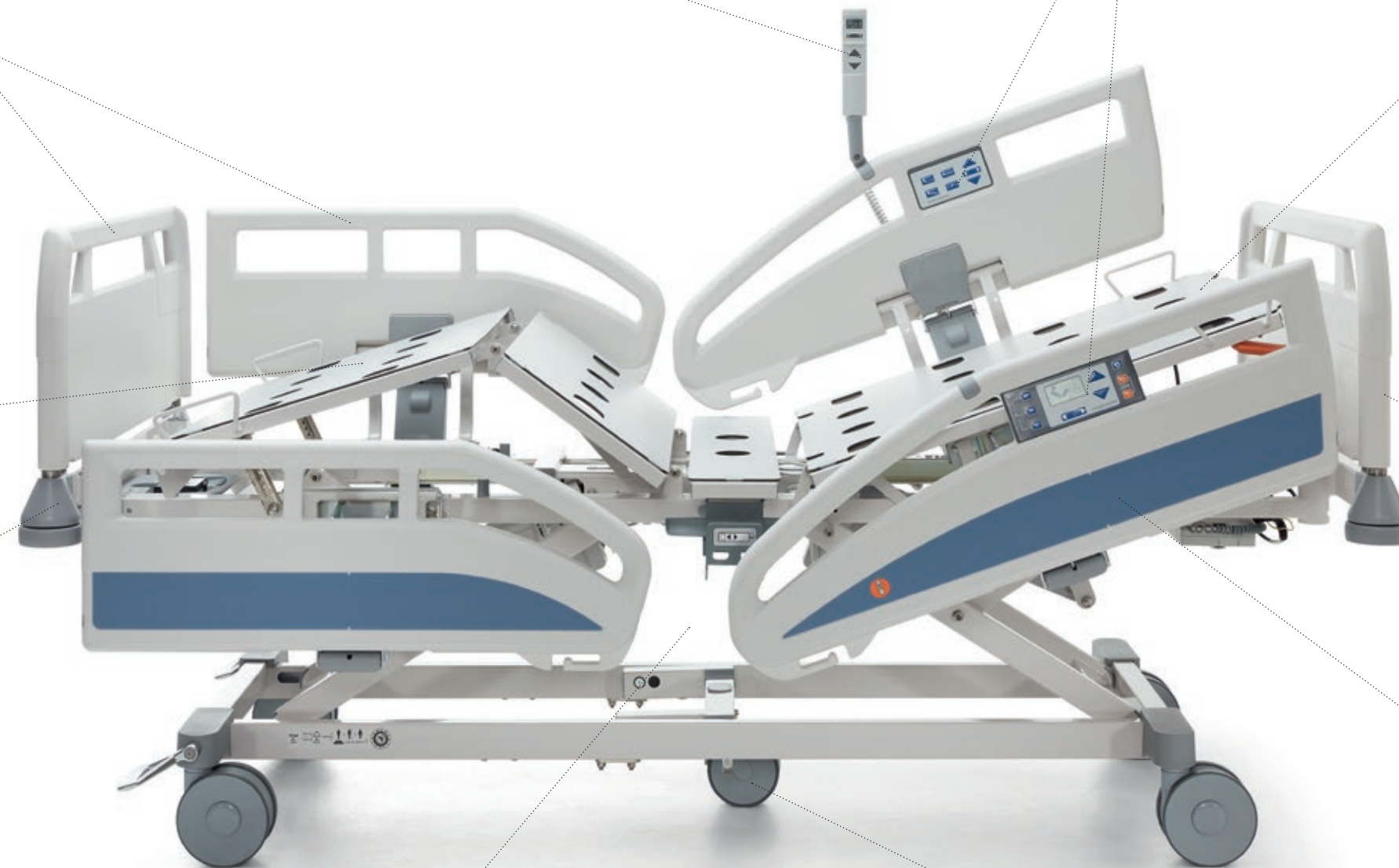



De nieuwe
Protega
voor nog meer
bescherming

Individuele bescherming – de zijhekbescherming

Valbescherming voor patiënten heeft de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd zijn **mobilititeit** en bewegingsvrijheid vaak ook belangrijk. De zijhekbescherming van Evario biedt hiervoor de geschikte oplossing. De **beschermhoogte tot 41 cm** maakt het probleemloos aanbrengen van comfort-, anti-decubitus- en wisseldrukmatrassen mogelijk.

De **¾-zijhekbescherming** beschermt een groot deel van het ligvlak en biedt daarbij een hoge bescherming (afbeelding 1). Tegelijkertijd is het plaatsbesparend, optisch aantrekkelijk en biedt het een

vrije doorkijk voor de patiënten. De verpleegkundigen kunnen deze zijhekbescherming snel en intuïtief met **slechts één hand** bedienen – een grote verlichting bij hectische situaties (afbeelding 2). De beweging van de zijhekbescherming is nauwelijks hoorbaar zodat het de patiënt niet stoort.

Aan de bevestiging van de ¾-zijhekbescherming aan het voetuiteinde is een stootrol voorzien die zowel het bed als de kamerinrichting beschermt tegen zijdelings botsen (afbeelding 3).

Met de nieuwe **Protega-zijhekbescherming** biedt **Stiegelmeyer** een alternatief aan in de vorm van een flexibele oplossing voor de behoeften van de patiënt. De **gedeelte zijhekbescherming in vleugelvorm uit hoogstaand kunststof** is naar keuze verstelbaar aan het hoofduiteinde of over de volledige lengte van het ligvlak (afbeelding 4). Op die manier biedt het de patiënt een oriëntatiehulp of volledige bescherming. **Door middel van een beugel bewegen de vleugels door de kracht, gedempt en rustig omlaag zonder daarbij veel ruimte in beslag te nemen** (afbeelding 5). Het voelt ergonomisch en

aangenaam aan. De Protega-elementen aan het **hoofduiteinde** bewegen mee wanneer de rugleuning wordt versteld en bieden daardoor ook in zitpositie een optimale bescherming (afbeelding 6).

Dankzij de vlakke constructie zonder langsliggers is een allesomvattende **klembescherming** alsook een makkelijke en grondige reiniging mogelijk. De stabiele **handgreep** biedt steun bij het oefenen van staan, stappen of mobiliseren.



Intuïtieve bediening naar wens

Bij de Evario is er keuze uit **2 bedieningsapparaten** die naar wens ook parallel ingezet kunnen worden: een **LCD-handbediening** (afbeelding 1 en 2) en een **bedieningspaneel** dat vast in de Protega-zijhekbescherming **geïntegreerd** is (afbeelding 3 en 4). Beiden zijn even intuïtief en overzichtelijk gevormd, zodat verpleegkundigen en patiënten zonder transformatie van apparaat kunnen wisselen wanneer dat nodig is. Dit ondersteunt de flexibele inzetbaarheid van de Evario op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis.

Zowel de handbediening als het bedieningspaneel beschikken over verschillende niveau's voor patiënten,

verplegend personeel en techniekers; een duidelijk scherm, grote pijltoetsen om de functies te bedienen en makkelijke en duidelijke pictogrammen. Ze zijn bedienbaar met slechts één hand. Beiden zijn robuust en zijn makkelijk te reinigen.

Optioneel kunnen verpleegkundigen de bedieningsopties met een **schakelkast** in de dekendrager blokkeren of vrijgeven. Alternatief is in de dekendrager eveneens een bijkomende **bedieningsmodule met instellingen voor noodgevallen** beschikbaar.

De slanke, elegante **LCD-handbediening** is voorzien van een **verlicht scherm** en **slechts 3 toetsen** (afbeelding 5). Patiënten kunnen snel en makkelijk de gewenste verstelposities van het bed via het scherm selecteren en toepassen. Dankzij deze intuïtieve bediening kunnen ook personen met beperkte vaardigheden ervan gebruik maken. Voor comfortabel in- en uitstappen komt de Evario tijdens de hoogteverstelling automatisch tot stilstand op een ergonomische hoogte van 40 cm.

Om onbedoeld verstellen van het bed te voorkomen, beschikt de LCD-handbediening over **3 gescheiden bedieningsniveaus** voor patiënten, verpleegkundi-

gen en technisch personeel. Dit geeft bijvoorbeeld de zekerheid dat enkel verpleegkundigen de Trendelenburgpositie kunnen instellen. Voor techniekers biedt het 3^e niveau praktische instellingen voor het onderhoud en foutenanalyses.

Om van niveau te wisselen, houdt het personeel de handbediening voor een ontgrendelmagneet in de zijhekbescherming (afbeelding 6). Wanneer de handbediening niet gebruikt wordt, kan deze aan de zijkant van het bed opgeborgen worden, beschermd tegen beschadigingen (afbeelding 7).





1.



2.



3.



4.



5.



6.

Geïntegreerd bedieningspaneel in de zijhekbescherming

Indien de Evario is uitgerust met de Protega-zijhekbescherming, is het bed optioneel met innovatieve bedieningspanelen bestuurbaar. Deze **vlakke, elegante module** is aan beide zijden van het bed geïntegreerd in de zijhekbescherming. Ze dragen gelijktijdig bij tot een makkelijk hanteerbaar **bedieningsoppervlak voor de patiënt** (afbeelding 1) en tot bijkomende **opties voor de verpleegkundige** of de techniker (afbeelding 2).

De patiënt heeft dankzij de bedbesturing een intuïtieve keuze uit **4 verstelmogelijkheden**: De hoogte-

verstelling van het bed, het instellen van de rug- en bovenbeensteun alsook het omschakelen van de ligpositie naar een aangename zithouding. Lezen, eten of opstaan wordt daardoor makkelijker en bevordert de genezing.

De buitenkant van de module is voorzien van een **groot scherm** en biedt net als de LCD-handbediening de keuze uit gescheiden bedieningsniveau's voor patiënten, verpleegkundigen en technisch personeel. Naast de normale instellingen zijn medische posities zoals bijvoorbeeld de Trendelenburgpositie mogelijk.

Daarnaast kan de verpleegkundige bij een noodgeval ogenblikkelijk met een drukknop de **CPR-positie** selecteren.

3 voorgeprogrammeerde posities van de rugleuning die in het dagelijks leven in een ziekenhuis vaak nodig zijn, kunnen bij de Evario met slechts één druk op de knop van de module voor de patiënt geselecteerd worden, wat praktisch en ontlastend is voor de verpleegkundigen. Indien de rugleuning is ingesteld op een helling van 15°, is dat een aangename rustpositie voor de patiënt (afbeelding 3). Bij 30°

worden de longen ontlast en de ademhaling wordt vergemakkelijkt (afbeelding 4). Onder een hoek van 45° kan er gegeten worden en kunnen gesprekken aangenaam gevoerd worden op ooghoogte (afbeelding 5). Met behulp van het scherm en pijltoetsen is bovendien een **Cardiac-Chair-Position** instelbaar (afbeelding 6).



Intelligent
ziekenhuisbed
met sensors



Digitale assistentiesystemen

Onder de naam "e-help" ontwikkelt Stiegmeyer digitale assistentiesystemen. Met behulp van sensoren informeert het ziekenhuisbed de verpleegverantwoordelijke over belangrijke veranderingen. Zo worden patiënten nog beter beschermd en dit biedt eveneens een ontlasting voor het personeel.

Een belangrijk element is het optionele **Out-of-bed-systeem**. Dit systeem registreert via een belastings-

sensor in de rugleuning van de Evario wanneer een valgevaarlijke patiënt het bed verlaat. Via de aansluiting op het interne oproepsysteem vindt dan na een vooraf ingestelde tijdsinterval een melding naar het verplegend personeel plaats, indien de patiënt niet terugkeert. Er kunnen tijdsintervallen van 15 seconden, 30 seconden, 2 minuten of 15 minuten worden ingesteld. Bijkomend kan met het out-of-bed-systeem een **onderbedlicht** worden ingeschakeld. Dit geeft een

aangenaam licht op de grond en vergemakkelijkt de oriëntatie voor patiënten in het donker (grote afbeelding).

Indien de Evario met een **akoestisch remsignaal** is uitgerust, komt er wanneer de stekker is verbonden, een melding indien de rem niet is ingeschakeld. Dit voorkomt vallen bij het verlaten van een onverlicht bed. Ook beschadigingen van de stekkerdoos en stroomtoevoerleidingen worden vermeden, daar het



signaal van de gebruiker voor het bedtransport eraan herinnert, de stekker uit te trekken (afbeelding rechts).



Geoptimaliseerd
voor **machinale
verwerking**

Met veilige hygiëne tegen multi-resistente ziekteverwekkers

Multiresistente ziekteverwekkers vormen een grote uitdaging voor elk ziekenhuis. Door de korte verblijfsduur en de snelle wissel van patiënten wordt de preventie tegen infecties nog belangrijker. Een **veilige hygiëne** van de bedden speelt hierbij een belangrijke rol. De Evario is zeer makkelijk **en grondig te reinigen en te desinfecteren** – zowel handmatig als machinaal. Stiegmeyer beschikt over meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van bijzonder hygië-

nische en machinewasbare bedden. Deze expertise wordt gereflecteerd in de Evario: Het bed is **vlak en zonder gleuven** geconstrueerd, zodat vervuiling zich niet onopgemerkt kan vastzetten. Zowel het Intercontinental hoofd- en voetuiteinde (afbeelding 1) alsook het model Stelo (afbeelding 2) versterken deze optimale hygiëne-eigenschappen.

Uitneembare elementen en gebogen vormen, vergemakkelijken de manuele reiniging en **ontlasten het personeel** (afbeelding 3). Het ziekenhuis bespaart hierdoor tijd en geld.

De Evario is standaard volgens **norm IPX6** en in de machinewasbare uitvoering volgens **IPX6w** tegen vocht beschermd. Dankzij de machinale reiniging staat de exploitant bijzonder sterk in de bestrijding

tegen gevaarlijke ziekteverwekkers. Een optimale **waspositie** is op de handbediening en het bedieningspaneel reeds voorgeprogrammeerd (afbeelding 4). Dankzij de kunststof Protega zijhekbescherming is de Evario ook voor wasinstallaties geschikt - dit is een voordeel waarin hij zich onderscheidt van andere modellen (afbeelding 5).





Ontlasting voor de verpleegkundigen in de dagelijkse zorg

Verpleegkundigen krijgen in de dagelijkse zorg vaak te maken met fysieke en mentale inspanningen. De Evario zorgt met zijn comfortabele bedienbaarheid in vele situaties voor ontspanning en ontlasting. De **grote hoogteverstelling** van 32 tot 91 cm komt daarbij bijzonder goed van pas – ook grote verpleegkundigen kunnen op die manier op een goede werkhouding op heuphoogte werken (afbeelding 1). Indien gewenst, is het bed met een vaststaand hoofdeinde leverbaar, dat niet meebeweegt wan-

neer het bed in hoogte versteld wordt. Zo worden mogelijke beschadigingen aan de kamerinrichting vermeden.

De geïntegreerde **bedverlenging tot 28 cm** scoort met zijn gemakkelijke bedienbaarheid. De bedverlenging is zeer makkelijk uittrekbaar, zodat verpleegkundigen hun rug nauwelijks belasten (afbeelding 3).




Benefits for nursing staff

- Rugvriendelijk werken dankzij grote hoogteverstelling tot 91 cm
- Bed laat zich moeiteloos manoeuvreren
- Voorgeprogrammeerde verzorgpositie van het bed op het geïntegreerde bedieningspaneel



In smalle kamers en gangen is het vervoeren van het bed een grote uitdaging. Hier komt de optionele **5° rol** goed van pas. De verpleegkundige kan hierdoor nauwkeurig manoeuvreren zodat het bed en de inrichting van botsingen bespaard blijft (afbeelding 2). Het zeer stabiele hoofd- en voeteinde hebben een praktische grip en garanderen daarom een makkelijke hanteerbaarheid van het bed. Een lichte vergrendeling voorkomt het ongewild verwijderen van het hoofdeinde.

De vele nuttige details van de Evario vormen een groot praktisch geheel. Bij noodsituaties kan de **CPR-positie** ogenblikkelijk manueel worden ingesteld door middel van een hendel aan de rugleuning. De aangenaam verlichte bedieningselementen zorgen ook in het donker voor zichtbaarheid (afbeelding 4). En de voorgeprogrammeerde verzorgpositie van het bed vereenvoudigen de verzorging aanzienlijk. De verpleegkundige wint daardoor tijd en kan meer persoonlijke aandacht schenken aan de patiënt.

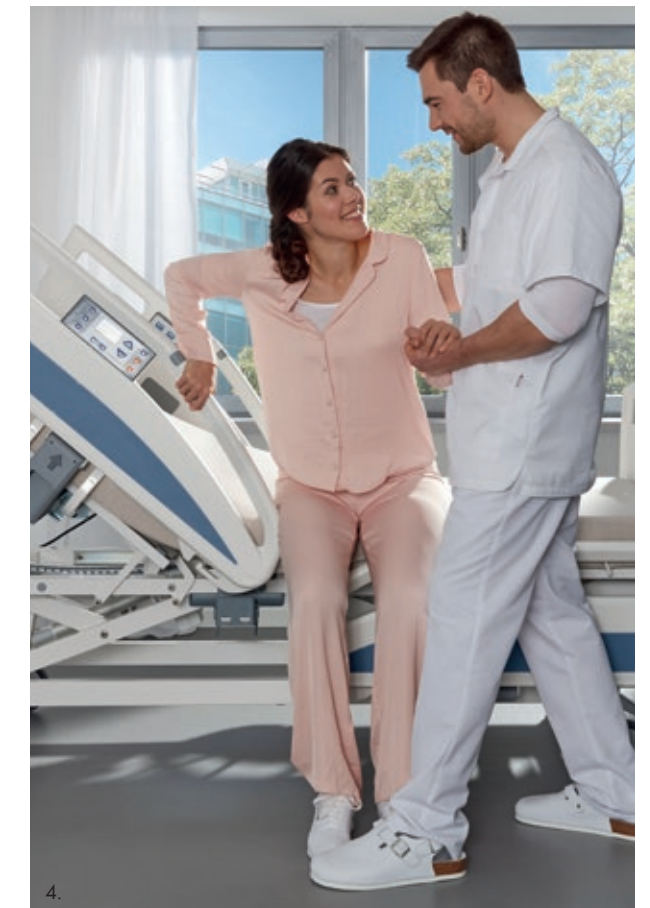

Veel ruimte voor
grote patiënten
dankzij **speciale
maten**

Voordelen voor patiënten

- Veel plaats door bedverlenging en optionele speciale maten
- Veiligheid en mobiliteit door gedeelde zijhekbescherming en lage hoogte tot 32 cm
- Eenvoudige en intuïtieve verstelling van het bed met LCD- handbediening of bedieningspaneel

Comfort en veiligheid voor de patiënten


Sedert meerdere jaren worden patiënten over het algemeen groter en zwaarder. Dankzij de Evario zijn ziekenhuizen hierop optimaal voorbereid: Het ligvlak heeft een **optionele lengte van 210 cm** en is verlengbaar tot 228 cm. Indien gewenst, is er ook een **100 cm brede variant** verkrijgbaar (afbeelding 2). De hoge veilige werklust tot 260 kg is geschikt voor patiënten met een gewicht tot 230 kg (naar gelang het gewicht van de toebehoren). De Evario biedt

onder alle omstandigheden voldoende ruimte en comfort – hiertoe draagt ook de **rugleuning verstelbaar in de breedte** bij, die tijdens het verstellen onaangename zijdelingse stoten voorkomt. De diepste positie van het bed van slechts 32 cm draagt bij tot de valpreventie (afbeelding 1).

Dankzij de mobiele LCD-handbediening alsook de vast geïntegreerde bedbesturing, kan de patiënt de

Evario makkelijk en aangenaam verstellen naar wens. De gedeelde Protega-zijhekbescherming alsook de handgrepen rondom het bed bevorderen de mobiliteit van de patiënt: Hij kan **zelfstandig opstaan** en zich overal vasthouden (afbeelding 4). Zowel de v-vormige uitsparing van de Protega- alsook de slanke langsliggers van de ¾-zijhekbescherming bieden **vrije doorkijk** in de kamer of naar het venster, zodat de patiënt zich niet gevangen voelt (afbeelding 3).

Het optimale comfort en een aangename esthetiek maken van de Evario een ziekenhuisbed waarin men zich goed voelt. Patiënten kunnen in dit bed herbronnen en energie opdoen. Dat bevordert hun genezing.

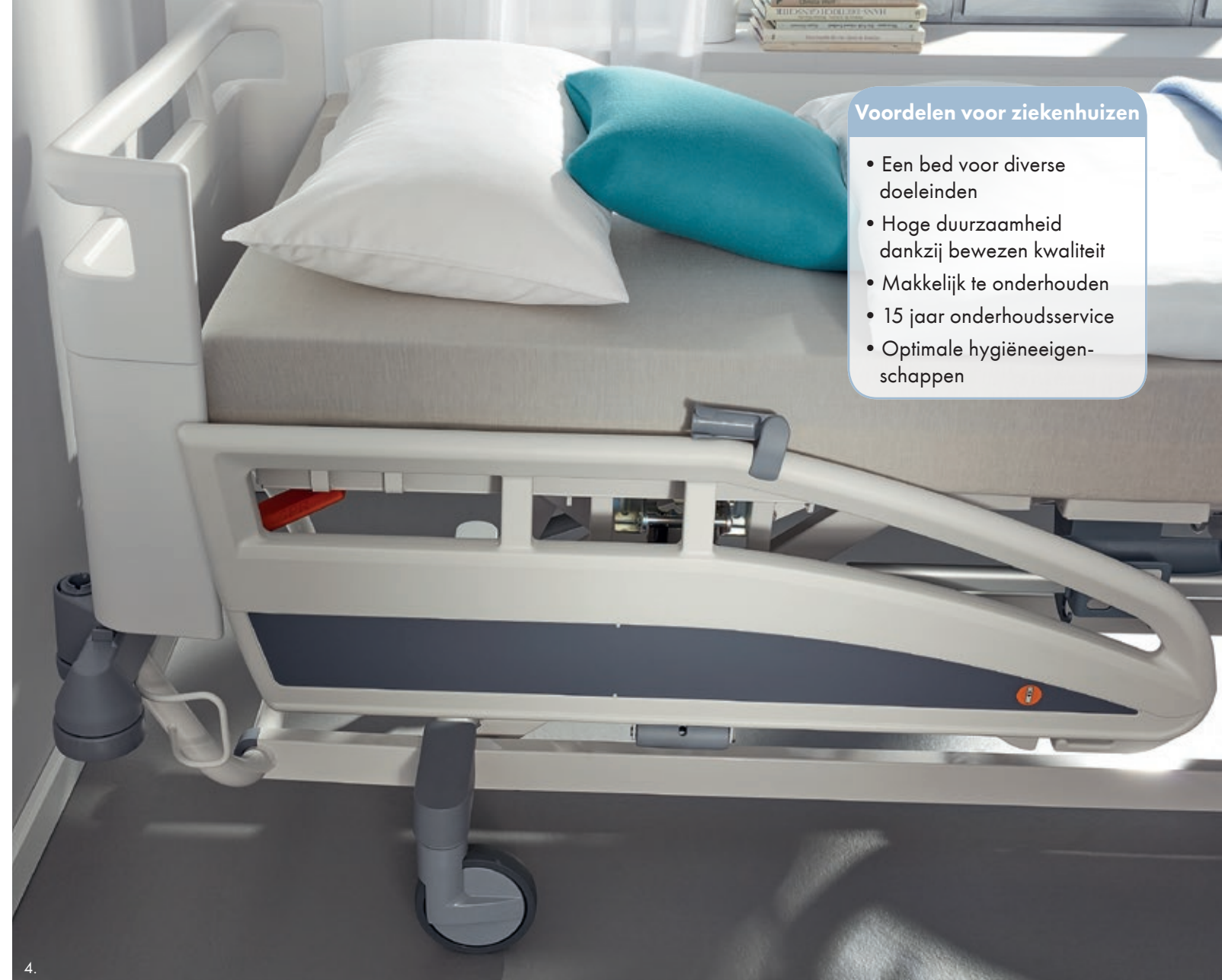

Voordelen voor ziekenhuizen

- Een bed voor diverse doeleinden
- Hoge duurzaamheid dankzij bewezen kwaliteit
- Makkelijk te onderhouden
- 15 jaar onderhoudsservice
- Optimale hygiëne-eigenschappen

Economische voordelen dankzij hoge kwaliteit

De Evario is een investering die loont, daar het voor een ziekenhuis een optimaal bed is met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding, draagt het bij tot besparingen op lange termijn. Alle componenten worden intensief en regelmatig **ver boven de norm getest** om een lange levenscyclus van het bed te garanderen. Door zijn intelligent design gaat de Evario alle risico's van voorheen uit de weg.

Zo is het geïntegreerde bedieningspaneel extreem bestand tegen beschadigingen, omdat het niet kan afbreken of vallen. Indien een herstelling toch nodig



zou zijn, is dit dankzij dit model goed mogelijk, zonder dat daarbij de zijhekbescherming gedemonteerd moet worden. Dankzij het uitgebreid aanbod aan uitrustingen van stootrollen en -kegels, zijn bed en wanden beschermd tegen beschadigingen (afbeelding 2). Stiegmeyer staat ervoor garant dat **vervangonderdelen** voor alle componenten van het bed tot 15 jaar na aankoop verkrijgbaar zijn. De Evario is **"Made in Germany"**.

Het onderhoud van het bed is bijzonder makkelijk. Dankzij de intelligent gedefinieerde **kabels** wordt

schade voorkomen. Het bedieningsniveau voor technisch personeel op de LCD-handbediening en het bedieningspaneel biedt nuttige instellingen voor onderhoud, **foutenanalyse** en reset-functies (afbeelding 3). De besturing van het bed is makkelijk toegankelijk onder de rugleuning. En de sterke, duurzame **Lithium ionen accu** moet zelden vernieuwd worden. Indien deze toch verwisseld moet worden, is de accu makkelijk toegankelijk.

Het optioneel **vaststaand hoofdeinde** beweegt niet mee tijdens de hoogteverstelling, zodat botsin-

gen met de kamerinrichting vermeden worden (afbeelding 4). De hoofd- en zijhekbescherming kan **naar wens worden samengesteld** – mogelijk ook de klassieke Stelo-hoofddeinde in combinatie met de nieuwe Protega-zijhekbescherming (afbeelding 1). Ziekenhuizen kunnen zo met individuele esthetiek de kwaliteit van het wachten in de kamers omhoog trekken. Dankzij het modulair systeem is de Evario een bed dat zich zelfs voor zeer specifieke eisen aanpast, het budget omlaag houdt en het dagelijks leven van de mensen in het ziekenhuis aangenamer en mooier maakt.

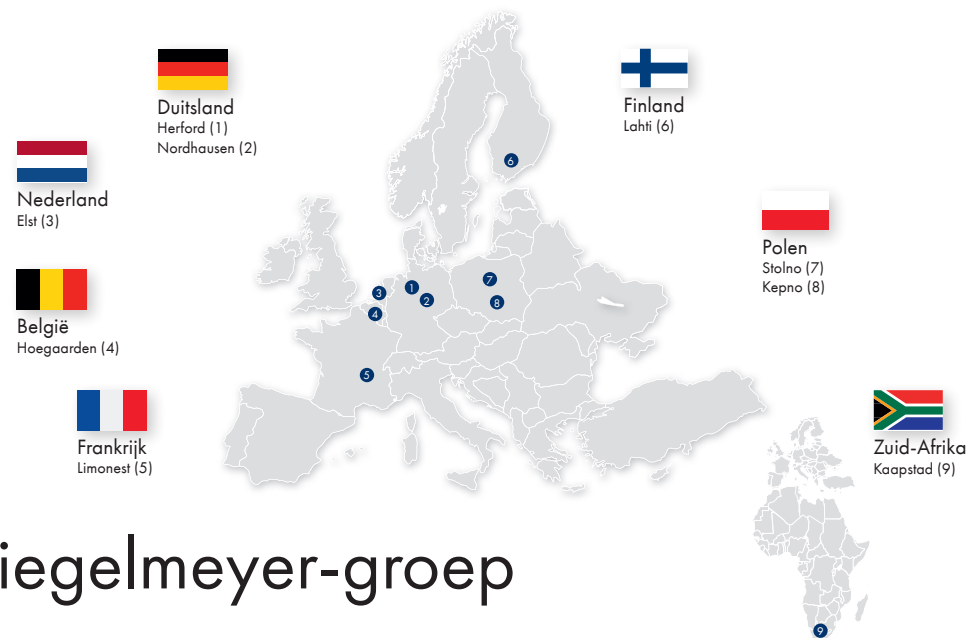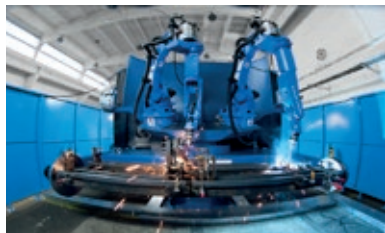

De Stiegmeyer-groep

De Stiegmeyer-groep staat voor kwalitatief hoogwaardige producten voor klinieken en zorginstellingen voor de complexe eisen van medische instellingen. Het omvat de divisies Clinic, Care, Home Care en het servicegebied Assist. Op dit moment produceert het bedrijf ongeveer **113.000 bedden** per jaar en biedt het werk aan ongeveer **1000 mensen**. Het hoofdkantoor is gevestigd in **Herford**, overige productielocaties bevinden zich in het **Thüringer Nordhausen** en in **Stolno** en **Kepno** in Polen. De familie-onderneming kijkt terug op 117 jaar succes.

De Stiegmeyer-groep is wereldwijd actief ondanks de sterke wortels in het thuisland. De **export** is een

belangrijke pijler en wordt in de toekomst verder uitgebreid. **Verkoopmaatschappijen** werken in Frankrijk, Polen, Nederland, België, Finland en Zuid-Afrika. Stiegmeyer-producten worden naar **meer dan 60 landen** geëxporteerd.

Stiegmeyer gebruikt voor de productie de nieuwste technologie en respecteert tegelijkertijd de **bescherming van het milieu**. Eigen solarinstallaties, energie uit hernieuwbare bronnen en zuinige bedrijfsauto's helpen om de **uitstoot te beperken**. De onderneming hecht groot belang aan het eerlijk omgaan met haar werknemers en bevordert de **integratie** van mensen met een handicap.

Afmetingen en verstelbereiken

	Bedbreedte
	• Evario: Buitenmaten 99,7 x 219 cm / Ligvlak (matrasmaat) 87 x 200 cm • Evario 210 cm: Buitenmaten 99,7 x 227 cm / Ligvlak (matrasmaat) 87 x 210 cm • Evario 100 cm: Buitenmaten 109,7 x 219 cm / Ligvlak (matrasmaat) 97 x 200 cm
	Ligvlakhoogtes
	• Hoogteverstelling: ca. 35 – 91 cm • Hoogteverstelling d.m.v. Linea-rollen Ø 150mm ca. 32 – 88 cm
	Verstelbereiken

Hoofd- en voeteinde

	Design Stelo
	• Met robuuste roestvrij stalen profielen • Hoofd- en voeteinde compleet verwijderbaar • Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen • Dessins volgens Stiegmeyer-Resopal-collectie
	Design Intercontinental
	• Vervaardigd uit PE-kunststof • Hoofd- en voeteinde compleet verwijderbaar • Bijzonder makkelijk te reinigen • Keuze uit aantrekkelijke kleuren
	Vaststaand hoofdeinde
	• Hoofdeinde aan onderstel bevestigd • Blijft tijdens de hoogteverstelling van het ligvlak in dezelfde positie • Botsbescherming

Zijhekbescherming

	¾ zijhekbescherming
	• Beschermhoogte ca. 39 cm boven ligvlak • Neer te laten met één hand • Gebruiksvriendelijke en geluidloze bediening • Vrij zicht voor de patiënten
	Protega-zijhekbescherming
	• Beschermhoogte ca. 41 cm boven ligvlak • Gedeelde zijhekbescherming uit hoogstaand kunststof • Gemakkelijke, krachtondersteunde bediening met gedempte beweging • Omvangrijk klembescherming

Ligvlakken

	Hygiënisch ligvlak
	• Materiaal polypropyleen • Apart verwijderbare elementen • Waterafvoerende vormgeving • Optioneel met uitsparingen voor gordelsysteem
	Ligvlak van kunststof
	• Materiaal HPL • Apart verwijderbare elementen, optioneel beveiligd tegen verwijdering • Met uitsparingen voor gordelsysteem • Optimaal voor machinale verwerking

Zwenkwielen

	Integraal wiel - Doorsnede 150 mm - Hoogteverstelling ca. 35 – 91 cm - Bodemvrijheid onderstel ca. 17 cm
	ST-lichtgewichtwiel - Doorsnede 150 mm - Hoogteverstelling ca. 35 – 91 cm - Bodemvrijheid onderstel ca. 17 cm
	Dubbele loopwielen - Doorsnede 150 mm - Hoogteverstelling ca. 35 – 91 cm - Bodemvrijheid onderstel ca. 17 cm
	Linea-dubbel wiel - Doorsnede 150 mm - Hoogteverstelling: ca. 32 – 88 cm - Bodemvrijheid onderstel ca. 13,5 cm

Rempedaal

	Gegoten, verchromde beugels - Omlaag drukken om te remmen - Om de remmen los te laten, de beugel onderaan met de voet optillen - Gegoten voor een elegant design
	Beugels gegoten, verchromd met kleuraanduiding - Pedaal met kleuraanduiding - Snelle en intuïtieve bediening - Gegoten voor een elegant design
	Kunststofhendel met kleuraanduiding - Pedaal met kleuraanduiding - Snelle en intuïtieve bediening

Stootrollen

	Standaard - Doorsnede 100 mm - Hoog belastbaar massief materiaal - Buitenkant PVC, binnenkant polypropyleen (PP)
	Universeel - Doorsnede 100 mm - Verticaal en horizontaal werkend - Materiaal: polyamide (PA6)

Bedieningselementen

	Geïntegreerd bedieningspaneel - Aan beide zijden Protega-zijhekbescherming geïntegreerd - Praktische verstelopties voor patiënten (binnenzijde), verpleegkundigen en technisch personeel (buitenzijde) - Voorgeprogrammeerde bedposities - Snel neer te laten met de CPR-functie
	LCD-handbediening 3 bedieningsniveaus (patiënt, verzorgend personeel, technisch personeel) - Veel blokkeer- en instelmogelijkheden in normale werking en in noodsituaties - Foutenanalyse en resetfunctie op technisch niveau
	Schakelkast - Vast in de dekendrager - Voor blokkering van functiegroepen - Instelling Trendelenburg-positie
	Bedieningsmodule - Blokkering en bediening van alle losse functies - Noodinstellingen - Geheugenfuncties
	Bedieningssatelliet - Eenvoudige bevestiging aan de rugleuning - Individuele instelling voor de patiënt dankzij flexibele arm - Grote symbolen en goed bereikbaar
	Voetschakelaar - Makkelijke hoogteverstelling van het bed met voetbediening - Activering van de LCD-handbediening of bedieningspaneel

e-help - digitale assistentiesystemen voor hulp

	Out-of-bed-systeem - keuze uit 4 reactietijden voor het signaal - Automatische activering van de verlichting onder het bed mogelijk - Bediening en activering via aparte handschakelaar - Via open interface aansluitbaar op beschikbaar oproepsysteem (zie gebruiksaanwijzing)
	Vloerverlichting - Activeerbaar via LCD-handbediening of bedieningspaneel - Degelijke en niet-verblindende verlichting voor oriëntatie in het donker
	Remsignaal - Er klinkt een signaal bij niet uitgetrokken stekker en losse rem - Bescherming tegen beschadigingen en weggrollen van het bed

Extra voorzieningen

	Standaardrail Mogelijkheid voor het plaatsen van bijkomende apparatuur aan de zijkant van het bed
	Universele rails Biedt veel ruimte voor het aanhangen van toebehoren, bv. redonflessen

Technische specificaties

Afmetingen en gewichten	Evario	Evario 210 cm	Evario 100 cm
Buitenmaat	99,7 x 219 cm	99,7 x 227 cm	109,7 x 219 cm
Buitenmaten (vaststaand hoofdeinde)	99,7 x 227 cm	99,7 x 236 cm	–
Ligvlak (matrasmaat)	87 x 200 cm	87 x 210 cm	97 x 200 cm
Bedverlenging	28 cm	20 cm	28 cm
Ligvlakopdeling	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm	83 – 15 – 33 – 53 cm
Lengteaanpassing rugsteun	ca. 10 cm	ca. 10 cm	ca. 10 cm
Veilige werklast	260 kg	260 kg	260 kg
Maximaal gewicht patiënt	ca. 220 – 230 kg	ca. 220 – 230 kg	ca. 220 – 230 kg
Bodemvrijheid onderstel	ca. 17 cm	ca. 17 cm	ca. 17 cm
Bodemvrijheid onderstel (met Linea-rol Ø 150 mm)	ca. 13,5 cm	ca. 13,5 cm	ca. 13,5 cm
Totaal gewicht	ca. 160 kg	ca. 160 kg	ca. 165 kg
Beschermhoogte Protega zijhekbescherming	ca. 41 cm	ca. 41 cm	ca. 41 cm
Beschermhoogte ¾-zijhekbescherming	ca. 39 cm	ca. 39 cm	ca. 39 cm
Verstelbereiken			
Kanteling lage hoofdpositie	14°	14°	14°
Kanteling lage hoofdpositie (vaststaand hoofdeinde)	12°	12°	12°
Kanteling anti-Trendelenburg-stand	15°	15°	15°
Ligvlakhoogte	ca. 35 - 91 cm	ca. 35 - 91 cm	ca. 35 - 91 cm
Ligvlakhoogte met Linea-rol Ø150 mm	ca. 32 - 88 cm	ca. 32 - 88 cm	ca. 32 - 88 cm
Hoek rugsteun	70°	70°	70°
Hoek bovenbeensteun	40°	40°	40°
Hoek gestrekte hoge beenpositie	16°	16°	16°

Dessins

Snow White 9417-60	Azur 0744-60	Global Beech 4306-60	Noce Lyon 4232-60
Silver Grey 0160-60	Ottawa Maple 4209-60	Noce Praliné 4452-60	Baltic Sea D475-60
Gold 0446-60	Eternal Cherry 4325-60	Garonne Oak 4111-60	Storm 10542-60

Uitrustingen en opties

		Evario	Evario 210 cm	Evario 100 cm
Bedbreedtes  buiten	99,7 cm matras 87 cm (standaard)	●	●	–
	109,7 cm, matras 97 cm	–	–	●
Bedbreedte buiten	219 cm (standaard)*	●	–	●
	227 cm*	–	●	–
Zijhekbescherming	3/4 met eenhandige bediening	●	●	●
	Protega	○	○	●
Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde	Intercontinental	●	●	–
	Stelo	○	○	●
Basiskleur	Diamantwit	●	●	●
Ontsmetting, beschermingsklasse	handmatige verwerking, IPX6	●	●	●
	machinale verwerking, IPX6W	○	○	–
Ligvlakken	Uitneembare roosterbodem	○	○	–
	Hygiëne-ligvlak PP	●	●	●
	Hygiëne-ligvlak PP voor riemensysteem	○	○	○
	Ligvlak van kunststof (HPL) voor riemensysteem	○	○	–
Stootrollen	4 standaard kunststof, rondom	●	●	●
	4 standaard zacht, rondom	○	○	○
	4 universeel, rondom	○	○	○
	2 universeel hoofdeinde, 2 standaard zacht voeteneinde	○	○	○
Stootkegel	aan hoofd- en voeteneinde	●	●	●
	ST-lichtgewichtwiel Ø 150 mm	●	●	●
Zwenkwielen	Integraal wiel Ø 150 mm	○	○	○
	Dubbel wiel Ø 150 mm	○	○	○
	Linea dubbel wiel Ø 150 mm	○	○	○
	1 wiel	●	●	●
Geleidende wielenset	2 wielen	○	○	○
	4 wielen	○	○	○
	5 wielen	○	○	○
	2 x kunststof met kleuraanduiding	●	●	●
Rempedaal	4 x kunststof met kleuraanduiding	○	○	○
	Gegoten, verchroomde beugels	○	○	○
	Gegoten, verchroomde beugels met kleuraanduiding	○	○	○
	Hoofdzijde rechts	●	●	●
Posities vaste wielen	Hoofdzijde links	○	○	○
	Voeteneinde rechts	○	○	○
	Voeteneinde links	○	○	○
	Bedmidden (5 ^{de} rol)	○	○	○
Bedieningselementen	LCD-handbediening	●	●	●
	Geïntegreerd bedieningspaneel	○	○	○
	Schakelkast in de dekendrager	○	○	○
	Bedieningsmodule in de dekendrager	○	○	○
Out-of-bed-systeem	ja	○	○	○
	ja, incl. vloerverlichting	○	○	○
Extra voorzieningen	Standaardrails aan de lange zijden	○	○	○
	Universele rails aan de lange zijden	○	○	○
	5. rol	○	○	○
	Vaststaand hoofdeinde	○	○	○
	geïntegreerde bedverlenging	●	●	●
	geïntegreerde dekendrager	●	●	●
Houder voor oprichter	Ovale buis	●	●	●
	Ronde buis	○	○	○
Elektronische uitrusting	Voetschakelaar	○	○	○
	Remsignaal	○	○	○
	Vloerverlichting	○	○	○
	Bedieningssatelliet	○	○	○
Accu	Loodzuuraccu	○	○	○
	Lithium ionen accu	○	○	○

* Afwijkingen bij varianten met vaststaand hoofdeinde ● = Standaard ○ = optioneel – = niet leverbaar

Uw bed – onze zorg
Your bed – our passion

Finland / Suomi

Stiegmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
E-Mail stiegmeyer@stiegmeyer.fi
finland.stiegmeyer.com

Netherlands / Nederland

Stiegmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
E-Mail info@stiegmeyer.nl
netherlands.stiegmeyer.com

Poland / Polska

Stiegmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno, Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
E-Mail info.stolno@stiegmeyer.pl
poland.stiegmeyer.com

France

Stiegmeyer SAS
Bâtiment B
27 chemin des Peupliers
69572 Dardilly
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
E-Mail contact@stiegmeyer.fr
france.stiegmeyer.com

South Africa

Stiegmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries, Century City, Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
E-Mail info.southafrica@stiegmeyer.com
south-africa.stiegmeyer.com

Stiegmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42, 32051 Herford, Germany
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
E-Mail info@stiegmeyer.com
www.stiegmeyer.com

Technische veranderingen voorbehouden. De getoonde kleuren kunnen afwijken van de realiteit. Stand 03/2017. Versie 1. Artikelnummer 600675.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 03/2017. Version 1. Item no. 600675.

Vindt uw partner op onze website:
Find your local partner at our website:
stiegmeyer.com/partner