

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op uw vragen over onze machines.

- WAT IS HET BELANG VAN EEN MACHINE IN VERGELIJKING MET HANDMATIGE REINIGING?

Door de voorkeur te geven aan geautomatiseerde reiniging in de cabine, beschermt u uw medewerkers tegen ziekteverwekkers die tijdens de reiniging kunnen worden geprojecteerd.

U vermijdt de omgang met chemicaliën en het inademen van dampen, die een bron van beroepsziekten kunnen zijn.

De machine geeft u een constante reinigings- en desinfectiekwiteit: reiniging na reiniging, desinfectie na desinfectie, het resultaat is altijd hetzelfde.

Onze machines, ontworpen en geproduceerd in Duitsland, hebben een hoge beschikbaarheid. Ze kunnen 365 dagen per jaar onafgebroken worden bediend, zonder pauze tussen elke cyclus.

- WAT IS HET ECONOMISCHE BREAK-EVEN PUNT VAN EEN DERGELIJKE INVESTERING?

Onze oplossingen zijn rendabel vanaf het moment dat in uw bedrijf meer dan 0,5 VTE's worden ingezet voor het onderhoud van medische apparatuur.

- WAT ZIJN DE EXPLOITATIEKOSTEN?

De bedrijfskosten zijn zeer laag in vergelijking met een manuele behandeling. All inclusive (water, elektriciteit, producten, enz.) en exclusief afschrijving, tel je € 1,20 (excl. BTW) voor de reiniging en € 1,30 (excl. BTW) voor de desinfectie.

- WELKE MEDISCHE HULPMIDDELEN ZIJN COMPATIBEL MET REHAWASHCABINES?

Elk medisch apparaat dat met grote hoeveelheden water kan worden gereinigd, is compatibel. Onze klanten gebruiken de cabines voornamelijk voor medische bedden en manuele rolstoelen. Er is eveneens de mogelijkheid om u te voorzien van aangepaste trolleys voor klein materiaal. De cabines zijn niet geschikt voor het desinfecteren van endoscopen.

- MOET IK DE ELEKTRONICA (KRIKKEN, AFSTANDBEDIENINGEN) VERWIJDEREN OM EEN MEDISCH BED SCHOON TE MAKEN?

Nee. De bedelektronica is compatibel, zolang deze IP66 of hoger is geclassificeerd. Dit is het geval op recente bedden. Bij oudere bedden, zoals bij een hogedrukspuit, zullen de cilinders met de hand moeten worden verwijderd en behandeld.

- WAT IS DE LEVENSDUUR VAN EEN MACHINE?

Deze machines zijn ontworpen voor een levensduur van 10 jaar. Zij genieten een garantie van 2 jaar tegen fabricagefouten.

- WELK ONDERHOUD WORDT AANBEVOLEN?

De Rehawash machines vereisen een dagelijks onderhoud van enkele minuten. Het bestaat uit het reinigen van de filters om de kwaliteit van de reiniging te waarborgen. We stellen ook een

jaarlijks onderhoud voor of om de 3000 cycli. Tijdens dit preventief onderhoud vervangen wij slijtdelen volgens het plan van de fabrikant.

Om de levensduur van uw machine te optimaliseren, raden wij u aan gebruik te maken van Dr.Weigert producten die gecertificeerd zijn door Rehawash.

- **WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN DERGELIJKE MACHINE?**

De machines hebben bepaalde aansluitingen nodig. In het bijzonder een elektrische aansluiting, een watervoorziening (kalkvrij water) en een afvoer voor afvalwater vereist. Standaard is een 220 V aansluiting voldoende. Sommige opties vereisen een 400 V aansluiting.

- **KUNNEN SCHUIMRUBBEREN MATRASSEN WORDEN BEHANDELD?**

Voor de behandeling van schuimrubberen matrassen hebben we de mogelijkheid om een luchtdesinfectieapparaat (DSVA) toe te voegen. Dit betekent dat het schuim van de matras niet nat wordt, maar alleen in contact komt met droge waterstofperoxidedamp.

Bij het reinigen van een lucht-oplegmatras met schuimrubberen ondersteuning moet worden gecontroleerd of de schuimrubberen hoes waterdicht is. Als dat zo is, dan is er geen probleem bij gebruik van de Rehawash cabine. Is dit niet zo, dan moet deze worden verwijderd omdat het anders moeilijk te drogen is.

- **WELK BEREIK IS AANGEPAST AAN MIJN BEHOEFTE?**

De 313-serie reinigt alleen rolstoelen en is ontworpen voor rolstoelspecialisten, ziekenhuizen en revalidatiecentra.

De B309- en B904-reeksen zijn groot genoeg voor de behandeling van medische bedden.

o Een B309-cabine kan 1 rolstoel of 1 bed op een transportwagen rechtop behandelen.

o Een B309XL verlengde cabine behandelt 1 bed gemonteerd op trolley.

o De B904-cabines bieden plaats aan 1 bed in de standaardpositie. Voor een grotere efficiëntie is het ook mogelijk om 3 bedden op een trolley te laden in een enkele cyclus.

- **HOE LANG DUURT EEN CYCLUS?**

Een volledige reinigings- en desinfectiecyclus duurt tussen 8 en 12 minuten. Er zijn standaard 3 programma's beschikbaar: 8, 10 of 12 minuten. U kiest zelf het programma op basis van de toestand van de te reinigen apparatuur.

Als optie kunnen de cabines worden uitgerust met een condensatiedroger. Het drogen duurt ongeveer 15 minuten.

- **HOEVEEL WATER EN CHEMICALIËN WORDEN ER PER CYCLUS GEBRUIKT?**
De machine gebruikt ongeveer 40 tot 50 liter warm water (bij 55°) per cyclus. Er wordt ook 120 ml reinigingsmiddel (Neodisher MediClean Forte), 40 ml spoelmiddel (Neodisher MediKlar Special) en 250 ml ontsmettingsmiddel (Neodisher Dekonta AF) gebruikt.
- **BIJ WELKE TEMPERATUUR (WATER) WORDT ER GEREINIGD?**
Onze cabines zijn ontworpen voor reiniging met water van 55°. Deze temperatuur maakt een uitstekende efficiëntie van de chemische middelen mogelijk, voor een optimaal resultaat, terwijl het laag genoeg blijft om uw medische apparatuur niet te beschadigen.
- **WELKE CHEMICALIËN WORDEN AANBEVOLEN?**
Wij bevelen de volgende producten aan:
 - o Reinigingsmiddel : Neodisher MediClean Forte*
 - o Spoelmiddel: Neodisher MediKlar Special*
 - o Desinfectiemiddel : Neodisher Dekonta AF*
 - o Deze producten worden in Frankrijk geproduceerd en op de markt gebracht door het Duitse laboratorium Dr.Weigert. Ze profiteren van een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding.*
- **KAN IK DE CHEMICALIËN VAN MIJN KEUZE GEBRUIKEN?**
Technisch gezien heeft u de mogelijkheid om de producten van uw keuze te gebruiken. Onze cabines zijn echter gevalideerd in combinatie met de aanbevolen producten. Wij kunnen niet garanderen dat onze machines compatibel zijn met de producten van uw keuze.

U heeft geen antwoorden gevonden op uw vragen?

Contacteer ons

Distrac Group, Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden, België

+32 16 76 82 82

info@distracgroup.com