



Elvido

Améliorer le confort, faciliter les soins

La famille Elvido : des lits sur mesure

Des solutions intelligentes et modulaires au service des soins modernes

La nouvelle génération de lits de soins Elvido est conçue pour alléger le quotidien du personnel soignant tout en améliorant le confort et la qualité de vie des patients. Elle intègre des systèmes d'assistance numériques avancés et repose sur une conception modulaire, permettant d'adapter chaque lit aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

La gamme Elvido inclut également des lits bariatriques ainsi que des modèles particulièrement mobiles, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Fiables et polyvalents, ils répondent aux exigences de nombreux environnements de soins, y compris en psychiatrie.



Sommaire

Aperçu de l'Elvido	4
Variantes de modèles	
• Variante vervo	6
• Variante movo	8
• Variante forto	9
Vario Safe	10
Créer de l'espace – extension de lit	12
Rallonge de lit	13
Ergonomie et mobilisation	14
Possibilités de positionnement	15
Plus de protection et de qualité de vie pour les occupants	16
Concepts d'utilisation flexible	17
Alimentation électrique bien pensée	17
Solutions numériques	
• Out-of-Bed smart	18
• Out-of-Bed flex	19
Lampes	20
Panneaux et décors	22
Tissus et similicuir	23
Compléments judicieux	24
Équipements et options	26
Le groupe Stiegmeyer	27

Aperçu de l'Elvido

Vario Safe

- permet une adaptation à chaque étape des soins – de la mobilisation à la prise en charge en cas de soins intensifs en passant par le besoin de protection
- plus d'espace avec l'extension de lit flexible



Dispositif numérique :

Nous proposons des solutions numériques personnalisées – n'hésitez pas à nous contacter.



Orientation sur les besoins :

- Variante vervo : le polyvalent particulièrement cosy
- Variante movo : grandes roulettes pour une meilleure manœuvrabilité
- Variante forto : Variante pour charges lourdes (charge de travail sûre de 260 kg) avec tous les avantages de l'Elvido et une largeur confortable de 100 cm

Variante vervo



Variante movo



Variante forto



Un sommier pour toutes les exigences :

- sommier hygiénique standard avec éléments amovibles sans outils offre un accès pour l'entretien et se nettoie très facilement
- rallonge de lit intégrée avec rallonge du relève-jambes en option



Vieillir avec élégance :

- le système Vario Safe offre un grand choix de tissus, de couleurs, de formes et de motifs assortis autour du lit






Variante vervo

Le lit surbaissé polyvalent répondant à de hautes exigences

- plage de réglage en hauteur d'env. 25 – 80 cm
- la butée intermédiaire réglable garantit un contact sûr avec le sol lorsque les occupants se lèvent, quelle que soit leur taille ; l'orientation et le sens de l'équilibre sont renforcés par la perception tactile de la plante des pieds
- le système d'entraînement OpenBus de série permet d'utiliser le système Out-of-Bed en option



Dimensions extérieures/Plage de réglage en hauteur :

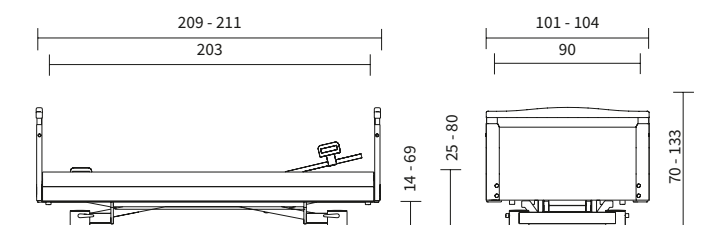




Variante movo

Le lit surbaissé particulièrement mobile

- roulettes doubles de 100 mm pour des manœuvres faciles
- le lit peut être facilement déplacé vers une autre chambre de soins ou vers une zone d'hygiène pour y être traité
- les patients immobiles peuvent participer à la vie sociale dans la salle commune ou sur la terrasse alors qu'ils sont alités
- roulette de guidage pour des manœuvres encore plus faciles



Dimensions extérieures/Plage de réglage en hauteur :

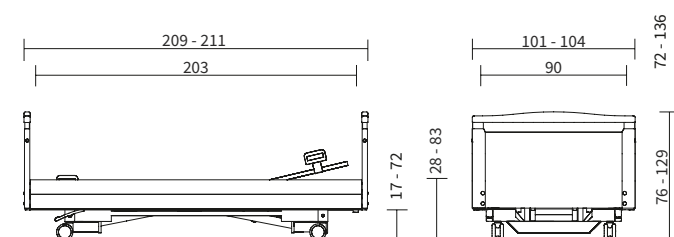


Variante forto

Plus de confort pour les occupants de grande taille et de poids élevé

- charge de travail sûre de 260 kg pour les occupants de poids élevé
- largeur de sommier de 100 cm et rallonge de lit facile à utiliser pour plus de place et de confort
- la hauteur de travail ergonomique allant jusqu'à 85 cm facilite les soins
- des roulettes doubles de 125 mm permettent une bonne manœuvre même en cas de charge de travail élevée



Dimensions extérieures/Plage de réglage en hauteur :

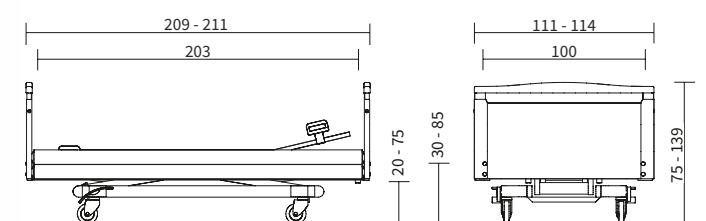

Vario Safe

Vario Safe – un système flexible au service d'exigences en constante évolution

Avec Vario Safe, l'Elvido s'adapte à toutes les étapes des soins, de la mobilisation aux besoins de protection, jusqu'aux soins intensifs. Les éléments peuvent être remplacés ou ajoutés sans outil, ce qui permet de gagner du temps et offre une flexibilité maximale pour les soins.



- Extension de 10 cm sans modifier les panneaux de tête et de pied
- Rallonge de 10 ou 20 cm
- Éléments latéraux de 90 cm comme aide à la mobilisation
- Système de protection latérale de 110 cm comme protection normative

- Manipulation conviviale et sécurité élevée
- Une hygiène simple et fiable
- Fermetures rapides de sécurité pratiques et sans outils
- Protection adaptée aux besoins et orientation pour les occupants



Le système breveté – en exclusivité pour les lits de soins Stiegmeyer

Adaptation des lits de soins sans outil aux situations individuelles et évolutives – pour un équipement de soins à la fois flexible, évolutif et parfaitement ajusté aux besoins.




Coûts de maintenance réduits

Grâce à des barrières latérales innovantes, les coûts d'entretien sont réduits. Les pièces de rechange sont disponibles dans les 72 heures via notre boutique en ligne dédiée au service après-vente, pour des réparations plus rapides sans longs délais d'attente.




Adapté aux soins intensifs

Physiothérapie, soins du corps et des pieds possibles à tout moment grâce à des panneaux de tête et de pied amovibles.

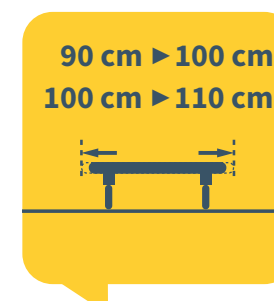

Extension du sommier


Pour les lits avec Vario Safe, le sommier peut être étendu à l'aide d'entretoises métalliques de 90 à 100 cm ou de 100 à 110 cm.

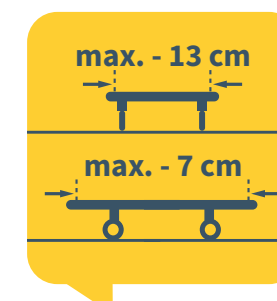

Réduire les dimensions de transport

Les lits avec Vario Safe peuvent être réduits pour le transport de jusqu'à 13 cm en largeur et de 7 cm en longueur – ceci protège les encadrements de porte et les meubles contre des endommagements.

Si le modèle Elvido doit offrir davantage de confort ou s'adapter aux besoins d'un occupant de plus grande taille, le kit d'extension de lit constitue une solution idéale. Il suffit de clipser un élément de 5 cm de large de chaque côté du sommier pour obtenir une extension totale de 10 cm. Ces éléments peuvent être utilisés de manière flexible et économique sur l'ensemble des lits Elvido d'une même unité de soins.

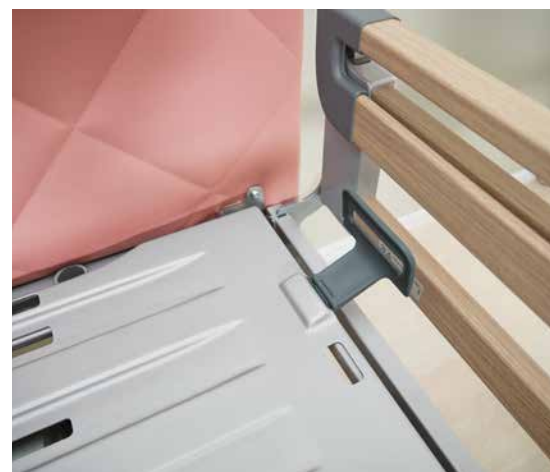

▲ Extension de 10 cm, sans modifier les panneaux de tête et de pied.



▲ Au choix, il est également possible de rallonger le relève-jambes réglable.

Réduire les dimensions de transport



Rallonge de lit intégrée


Plus de place pour les occupants de grande taille

La rallonge intégrée de 20 cm du cadre de lit assure un confort optimal et rend nos lits Elvido particulièrement résistants à l'épreuve du temps

- rallonge utilisable même sans modifications
- plus de confort et de sécurité avec les systèmes de protection latéraux et les caches adaptés
- de nombreuses options modulaires sont disponibles
- relève-jambes extensible
- Pour Vario Safe : Éléments latéraux de 90 cm remplaçables sans outils contre des éléments de 110 cm



Pièce rembourrée enfichable en 3 hauteurs différentes, en fonction du matelas.

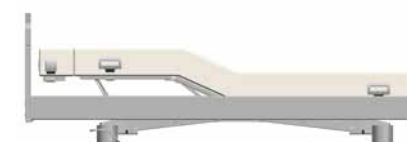

Rallonge de relève-jambes permettant de surélever les pieds.

Ergonomie et mobilisation

Préserver les soignants, faciliter l'accompagnement des occupants

Le mal de dos figure parmi les problématiques majeures dans le secteur des soins : selon les enquêtes, jusqu'à deux tiers du personnel soignant en souffrent. Il est donc essentiel de pouvoir travailler dans une posture verticale, respectueuse du dos, dans un maximum de situations. Avec une hauteur pouvant atteindre 85 cm, les lits Elvido facilitent cette ergonomie de travail. Leur conception modulaire, avec des éléments amovibles, permet en outre un accès aisé à l'occupant. Enfin, les différentes aides à la mobilisation intégrées à la structure favorisent le lever autonome des patients, réduisant ainsi le recours à une assistance extérieure.

Hauteurs de réglage du lit



Position basse

Position basse d'environ 25 cm pour éviter les blessures dues aux chutes.



Réglage individuel

Avec un réglage individuel du sommier, les occupants peuvent se lever beaucoup plus facilement en toute autonomie. L'arrêt intermédiaire peut être réglé individuellement, le réglage d'usine est de 38 cm.



Position haute

La position la plus haute se situe entre 80 et 83 cm selon la variante de modèle - idéal pour travailler à hauteur de hanche en ménageant son dos.



Prévenir efficacement les problèmes de dos

- très grande plage de réglage de la hauteur d'env. 25 jusqu'à 85 cm en fonction de la variante de modèle
- accès facile à la personne dépendante
- soulagement grâce à la mobilisation autonome de l'occupant

Possibilités de positionnement

Des soins qui font la différence

Les nombreuses possibilités de réglage de la gamme Elvido contribuent durablement au bien-être des occupants tout en facilitant le travail du personnel soignant.


Grâce à son sommier flexible, le lit permet d'adopter différentes positions thérapeutiques : la position proclive, utile pour prévenir les risques d'aspiration et de pneumonie ; la position Cardiac Chair, qui soulage le cœur ; ou encore la position de Fowler, favorisant la respiration.

Pour améliorer la circulation et prévenir certains risques, il est également possible d'opter pour la position de Trendelenburg ou pour une surélévation inclinée des jambes, contribuant à réduire les chocs et à soulager le système veineux.



Plus de temps consacré aux soins

Apporter un soutien ciblé aux occupants – tout en ménageant son corps. Cette technologie bien pensée facilite le quotidien et permet de gagner du temps et de l'énergie dans le cadre des soins.

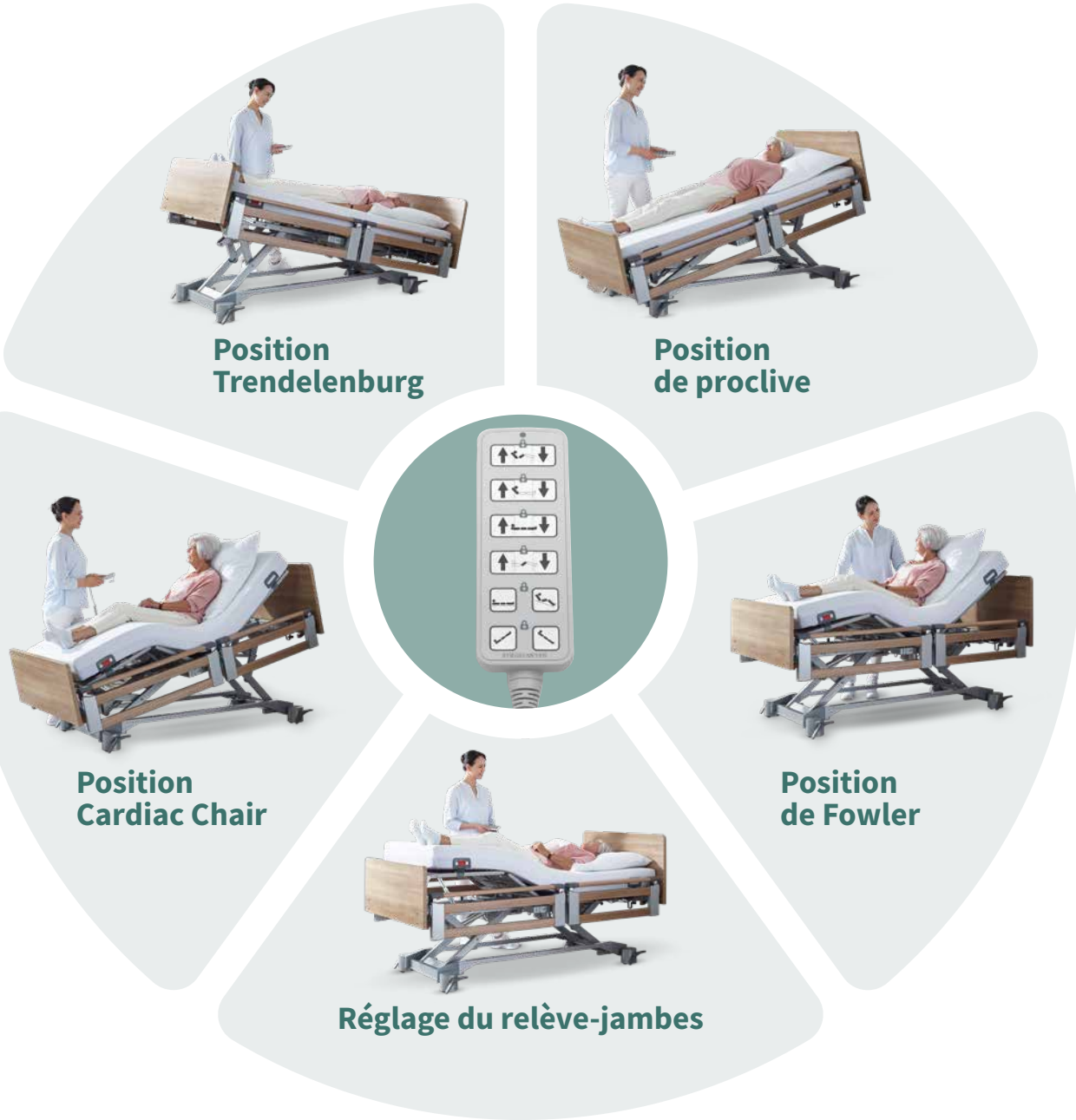



Position basse d'environ 25 cm pour éviter les blessures dues aux chutes.

Plus de sécurité et une meilleure qualité de vie pour les résidents

Le bien-être sans mesures restrictives


La santé, l'autonomie et la dignité des résidents sont au cœur des priorités, tout comme la qualité de vie au travail des équipes soignantes. Les lits surbaissés contribuent à créer un environnement de soins sûr, centré sur la personne, sans limiter inutilement la liberté de mouvement.

En réduisant la hauteur par rapport au sol, ils diminuent significativement le risque de blessure en cas de chute. Ils permettent également aux résidents de se déplacer de manière autonome et de sortir du lit en toute sécurité, à tout moment.

Ainsi, la mobilité, la confiance en soi et le confort au quotidien sont renforcés. Dans de nombreux établissements, l'introduction de lits surbaissés a permis de réduire le recours aux mesures de contention, tout en améliorant la sécurité, l'efficacité des soins et l'adhésion des résidents comme du personnel.

Principaux avantages des lits surbaissés

- **Liberté de mouvement préservée**
Les résidents peuvent s'installer dans leur lit et en sortir seuls sans se sentir à l'étroit ou gênés dans leurs mouvements.
- **Dignité et autonomie favorisées**
L'autonomie est encouragée tout en garantissant un niveau élevé de sécurité.
- **Soutien au personnel soignant**
Moins d'interventions et de mesures de surveillance sont nécessaires, ce qui favorise des routines de soins efficaces et respectueuses.

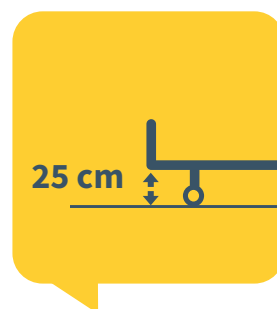

Sûr, efficace et pratique

Une hauteur de lit réduite est une solution simple mais efficace pour concilier sécurité et autonomie. Elle offre une solution sûre sur le plan juridique et économique qui répond aux normes de soins professionnels tout en mettant l'accent sur les besoins individuels des résidents.

Concepts d'utilisation flexibles

Nos télécommandes manuelles permettent une utilisation intuitive, sûre et pratique. Des symboles clairs facilitent le quotidien des soignants. Selon vos préférences, plusieurs concepts de commande sont disponibles :

- La télécommande éclairée HB400 comporte des symboles distincts pour chaque réglage individuel ou combiné, par exemple pour le réglage de la position de sommeil.
- Sinon, la télécommande à écran LCD vous guide à travers les différentes fonctions grâce à un menu intuitif. Une fois la sélection effectuée, vous pouvez facilement régler la position souhaitée à l'aide des grandes touches fléchées vers le haut ou vers le bas.



HB400



Télécommande LCD


Vos avantages :

- Commandes intuitives avec symboles clairs
- Chaque fonction verrouillable individuellement à l'aide d'un aimant
- Plus de confort au quotidien dans les soins

Alimentation électrique bien pensée pour chaque environnement



Deux options sont disponibles pour l'alimentation électrique : un système classique de 230 volts avec un câble spiralé flexible ou le système de 24 volts, facile d'entretien. Le système 24 volts garantit une sécurité élevée et un entretien réduit.

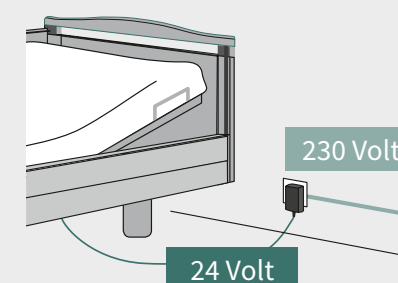


Des avantages forts

- Basse tension de protection du transformateur à la prise de courant
- Pas de composants 230 volts sur le lit
- La batterie disponible en option rend le lit de soins indépendant du réseau électrique en cas d'urgence

Des solutions numériques au service d'un quotidien plus serein et plus efficace

Des systèmes pratiques pour les soins hospitaliers de Stiegmeyer Connect

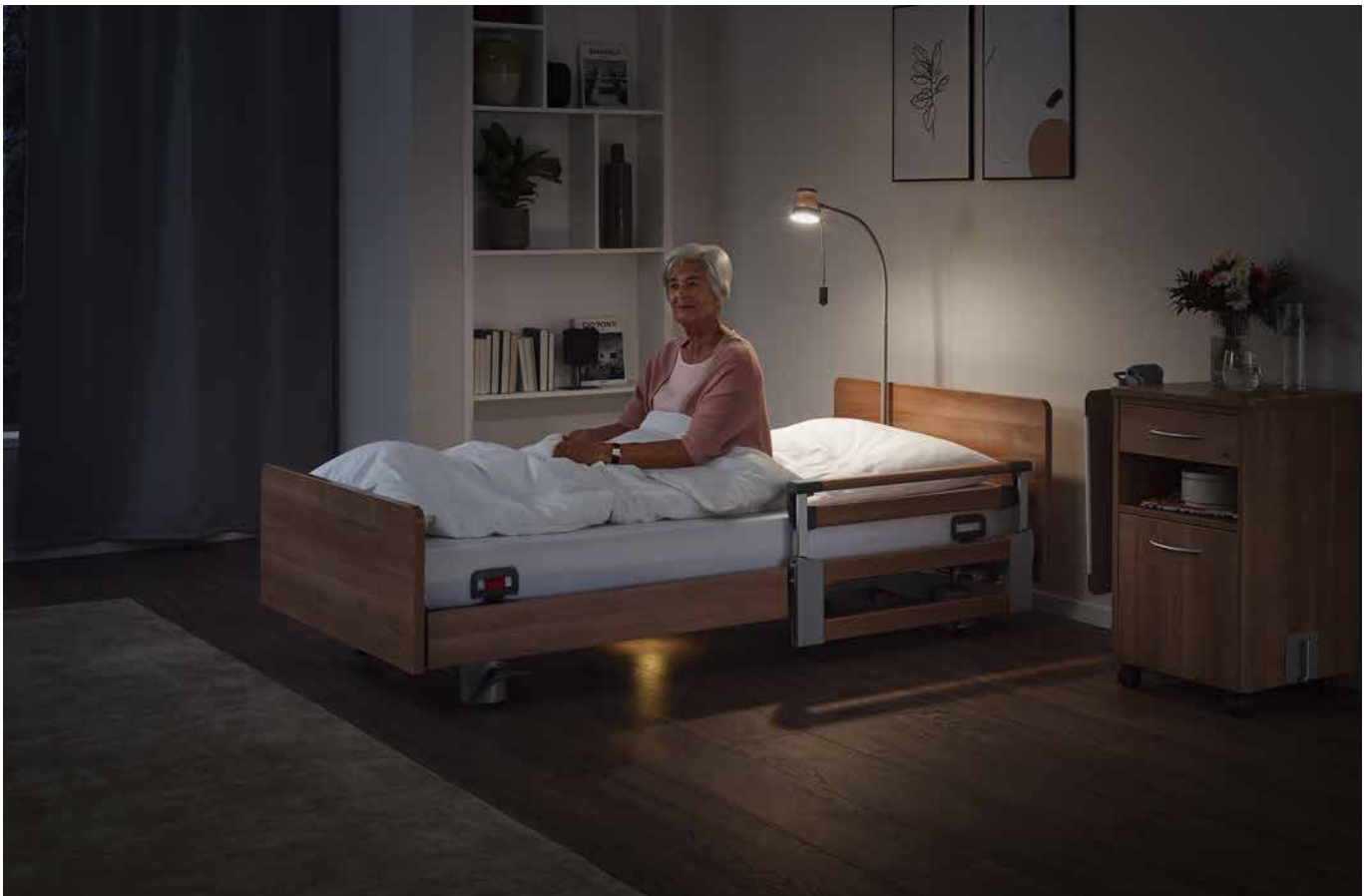

Système intégré Out-of-Bed smart

Aperçu d'Out-of-Bed smart

- le système intégré est prêt à l'emploi
- protection optimale - le simple redressement de l'occupant est enregistré par les capteurs
- meilleure orientation la nuit grâce à l'éclairage automatique
- configuration intuitive, indépendante de la langue, par télécommande
- utilisation simple et aide à la décision pour le personnel soignant grâce à 4 intervalles de temps prédéfinis entre 1 seconde et 15 minutes
- préparation plus facile du lit grâce à des composants discrètement intégrés



◀ Les intervalles de temps prédéfinis sur la télécommande facilitent l'utilisation par le personnel soignant.

Out-of-Bed avec éclairage automatique intégré

Nos systèmes out-of-bed intégrés et mobiles augmentent la sécurité des occupants et répondent aux exigences individuelles en fonction des besoins. Le simple redressement du patient dans le lit active déjà l'éclairage automatique. La nuit en particulier, le risque de chute est réduit grâce à une meilleure orientation. Détecter rapidement lorsque des occupants exposés au risque de chute quittent leur lit.



Réduction des séquelles dues aux chutes

Nos produits vous aident à mettre en œuvre les recommandations de la norme d'expertise en matière de prévention des chutes, pour plus de sécurité et un allègement des tâches au quotidien dans le domaine des soins.



Réduire les coûts

Moins de chutes grâce à une meilleure orientation : Le système d'éclairage automatique renforce la sécurité – et vous permet de réduire vos dépenses à court terme.

Système Out-of-Bed flex mobile

Utilisation simple avec seulement deux composants

Le système d'assistance mobile Out-of-Bed flex signale lorsqu'un occupant se lève et ne retourne pas dans son lit dans un temps défini. Le système peut être installé ultérieurement et échangé entre différents lits de soins Stiegmeyer.

B Boîtier de commande

- pour un placement ergonomique sur les panneaux ou les caches latéraux
- Raccordement électrique via la commande du lit ou une prise de courant



Concept de commande simple

4 intervalles de temps au choix avant le déclenchement de la signalisation de sortie du lit



A Barre de capteurs

- utilisable quelle que soit la largeur du sommier



Meilleure orientation la nuit

- La liseuse Sira peut être connectée à l'éclairage automatique de l'OOB flex
- La lampe s'allume lorsque l'occupant se lève



Lampes

Confort et sécurité

Nos luminaires offrent aux occupants une lumière agréable et confortable - sans pour autant déranger les voisins de chambre. Leur faible production de chaleur est un gage de sécurité supplémentaire. Les modèles Sola, Stella, Sira et Silena séduisent par leur design élégant. Ils peuvent être installés dans les douilles de la potence, sur le tube de la potence ou sur la table de nuit.



▲ La lampe Silena allie un design élégant à une précision fonctionnelle. La lumière peut être allumée et éteinte facilement grâce à une fonction tactile intégrée à la tête du luminaire, et son intensité peut être réglée en continu.

Les lampes Sola, Stella, Sira et Silena se distinguent comme des solutions d'éclairage intelligentes, alliant avec élégance fonctionnalité et design. Elles instaurent une atmosphère agréable tout en répondant précisément aux exigences du quotidien dans les environnements de soins. Qu'il s'agisse de s'orienter, de réaliser des soins infirmiers ou de profiter de moments de détente au chevet du patient, chaque lampe diffuse une lumière ciblée,

homogène et sans éblouissement, tout en s'adaptant aisément à une grande variété d'usages.

Leur esthétique épurée et leur finition soignée leur permettent de s'intégrer harmonieusement dans des intérieurs contemporains. Les options de personnalisation – notamment la couronne interchangeable du modèle Sira – offrent en outre de nouvelles possibilités pour créer des ambiances cohérentes et raffinées.



Sola



Stella



Sira



Silena

▲ Le modèle Sola est disponible soit avec une commande par interrupteur sur la tête de la lampe, soit avec un interrupteur à cordon.

▲ Les lampes Stella, Sira, et Silena offrent également la fonction d'éclairage automatique en liaison avec le système Out-of-Bed.




Choix et raccordement adaptés à chaque besoin

- Une large palette de designs est proposée, allant de lignes élégantes et épurées à des modèles agrémentés de touches colorées sur l'abat-jour et le corps luminaire à LED.
- Tous les modèles peuvent être raccordés via un connecteur de 3,5 mm. Grâce aux câbles adaptateurs correspondants, ils se branchent au choix directement sur le lit ou sur une prise secteur à l'aide d'un bloc d'alimentation.
- Les modèles Stella, Sira et Silena s'intègrent parfaitement au système d'éclairage automatique Out-of-Bed.
- La commande est conçue pour être simple et intuitive : Stella se pilote via un interrupteur situé sur la tête de la lampe, Sira à l'aide d'un interrupteur à cordon. Le modèle Sola offre les deux options, tandis que Silena se distingue par une utilisation fluide grâce à son écran tactile.

Design

Panneaux et décors

Pour la série Elvido, il existe un grand nombre de têtes et de pieds de lit confortables, avec ou sans poignée. Choisissez pour cela l'un des douze décors bois actuels - de la craie blanche au décor moderne à gros grain Hêtre Crenata.

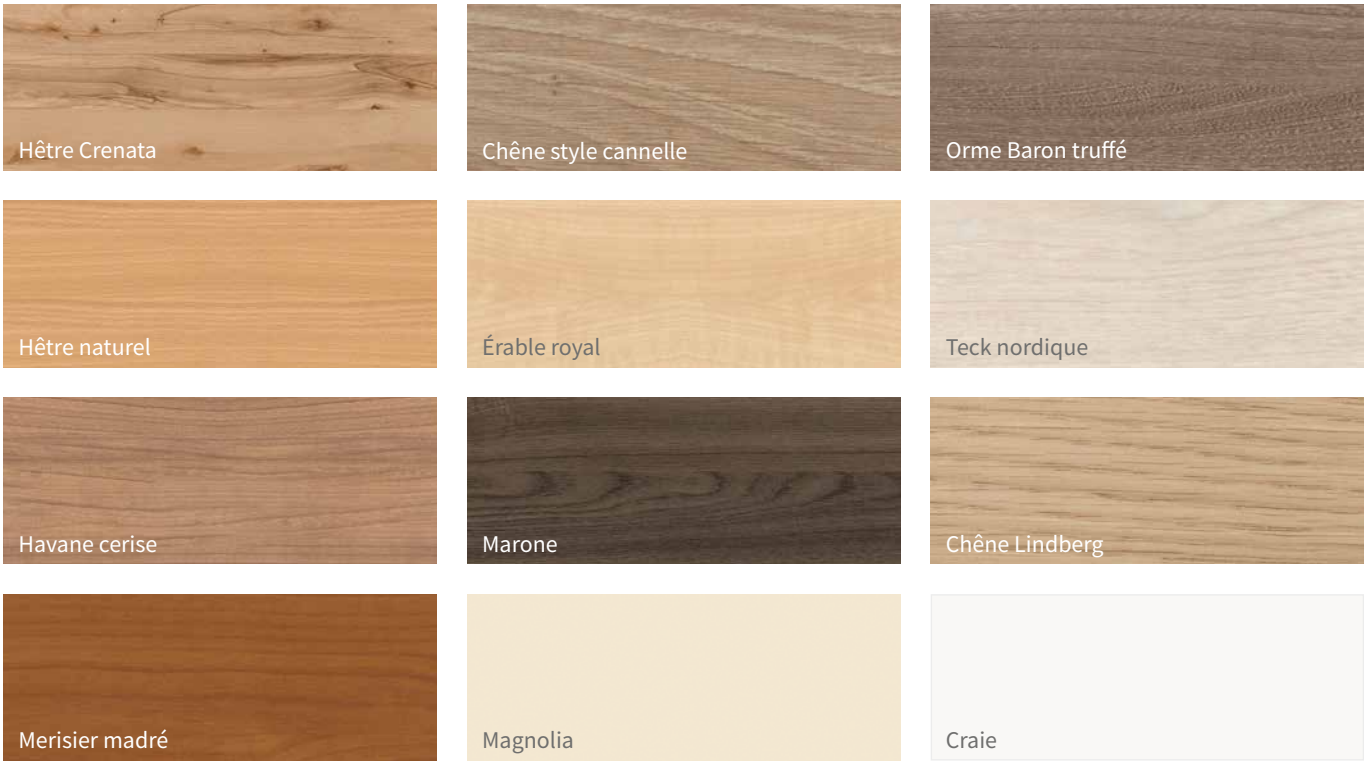

Panneaux de tête et de pied

Panneaux sans poignée



La série de pan-neaux Nobla est également disponi-ble en plusieurs revêtements et trois motifs de surpiqûres.

Panneaux avec poignée



Panneaux avec poignée et profilés latéraux



* avec profilés en bois massif

Échantillon des revêtements en tissu



Échantillon des revêtements en similicuir



Des compléments judicieux

Chaque exigence en ligne de mire

Toute la famille Elvido peut être complétée individuellement et en fonction des besoins par des options et des accessoires. Vous trouverez sur ces pages une sélection d'équipements et d'options pratiques qui facilitent les soins quotidiens et offrent un confort supplémentaire aux occupants.

Recouvrements de châssis en option

Le modèle Vervo est équipé de série de quatre habillages en plastique aux coins du châssis. Ceux-ci dissimulent certains éléments techniques et s'intègrent harmonieusement à la structure grâce à leur finition gris argenté, assortie au cadre. Sur demande, un habillage intégral est également disponible. Composé de deux éléments en plastique, il recouvre l'ensemble des faces du piètement et se décline en plusieurs décors bois. Le lit gagne ainsi en personnalisation et s'intègre encore mieux à son environnement.



Couleurs attractives au choix

- Chêne Lindberg
- Chêne style cannelle
- Havane cerise
- Hêtre naturel
- Craie
- Gris argenté

▲ Le recouvrement en option s'adapte à la couleur décorative du lit.

Galets déflecteurs



▲ Le galet déflecteur protège le lit et les murs en cas de mouvements horizontaux et verticaux.

Écarteurs



▲ L'écarteur protège le lit, les murs et l'équipement contre des dommages causés par les collisions.

Protection pour le lit et les occupants



▲ Les housses de protection pour les panneaux, les systèmes de protection et le poteau central permettent de protéger les occupants de tous les côtés contre les blessures dues aux chocs. Cela permet également d'éviter de passer entre les barres du système de protection.



▲ Les éléments du système de protection à barreaux discontinus peuvent être habillés individuellement.



▲ Un matelas de protection anti-chute en mousse composite de 3 cm d'épaisseur est recommandé pour une protection maximale contre les blessures dues aux chutes.



▲ NOUVEAU : Protection des bords pour panneaux de tête et de pied

Potence



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre brochure d'accessoires

◀ La potence facilite un positionnement confortable dans le lit.

Équipements et options

Toutes les données sont approximatives.

Variantes de modèles Elvido	vervo	movo	forto
Poids et mesures			
Dimensions extérieures (en fonction du cadre en bois)	100,3 x 211 cm	100,3 x 211 cm	110,3 x 211 cm
Sommier (dimension du matelas)	90 (87) ou 100 (97) x 200 cm	90 (87) ou 100 (97) x 200 cm	100 (97) x 200 cm
Répartition du sommier (RB / partie assise / RC / RJA)	85 / 15 / 40 / 60 cm	85 / 15 / 40 / 60 cm	85 / 15 / 40 / 60 cm
Compensation de la longueur du relève-buste	10 cm	10 cm	10 cm
Charge de travail sûre	225 kg	225 kg	260 kg
Accessibilité par dessous	15 cm	16 cm	19 cm
Poids total	140 kg	140 kg	150 kg
Entraînements			
Entièrement motorisé, 230 volts	✓	✓	✓
Concept d'entraînement 24 volts avec transformateur externe	O	O	O
Composants électroniques			
Télécommande standard éclairée HB400, fonction Trendelenburg incluse	✓	✓	✓
Télécommande LCD, fonction Trendelenburg incluse	O	O	O
Out-of-Bed smart	O	O	O
Out-of-Bed flex	O	O	O
Systèmes de protection latérale			
Système de protection à barreaux continus intégré Easy Click*	✓	✓	✓
Système de protection combinable intégré Easy Click*	O	O	O
Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe	O	O	O
Caches latéraux sans système de protection	O	O	O
Sommiers			
Sommier hygiénique (polypropylène, amovible avec logement pour sangle de fixation)	✓	✓	✓
Largeur de sommier 100 cm	O	O	✓
Rallonge de lit, 10 ou 20 cm	✓ intégrée	✓ intégrée	✓ intégrée
Roulettes			
Roulettes doubles	✓ Ø 50 mm	✓ Ø 100 mm	✓ Ø 125 mm
blocage des roulettes 2x2	✓	–	–
Blocage central des 4 roulettes	O	✓	✓
Systèmes de déflecteurs muraux			
Galet déflecteur à action horizontale	O	O	O
Roulette universelle à action horizontale et verticale	O	O	O
Écarteur sur le châssis	O	O	O
Plages de réglage			
Réglage en hauteur	25 – 80 cm	28 – 83 cm	30 – 85 cm
Réglage du relève-buste jusqu'à 70°	✓	✓	✓
Réglage du relève-cuisses jusqu'à 40°	✓	✓	✓
Position de proclive	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°
Position de déclive	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°
Équipement supplémentaire			
Éclairage sous le lit	O	O	O
Rallonge de lit intégrée avec barres de sécurité télescopiques et cache latéral	O	O	O
Porte-literie	O	O	O
Raccord de lampe intégré	O	O	O
Accumulateur intégré	O	O	O
Protection des bords	O	O	O

✓ = équipement standard
O = En option
– = Non disponible

Série Elvido – les normes de sécurité

- EN 14971 – Analyse des risques pour les dispositifs médicaux
 - EN 60601-1 – Sécurité pour les appareils électromédicaux
- EN 60601-1-1 – Compatibilité électromagnétique
 - DIN EN 60601-2-52 – Appareils électromédicaux

STIEGELMEYERGROUP



FOR PEOPLE WHO CARE

Nous proposons des solutions globales pour les soignants à travers le monde.

1 100

COLLABORA-TEURS DANS LE MONDE ENTIER

11

SITES

en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Finlande, en Afrique du Sud et en Chine



Des OFFRES sur mesure pour tous les MARCHÉS

CERTIFICATIONS internationales



INGÉNIERIE ALLEMANDE

PLUS DE

100 000

lits produits par an

15^{ANS}

de livraisons de pièces détachées


DISTRIBUTION dans plus de

100

pays



Notre expertise

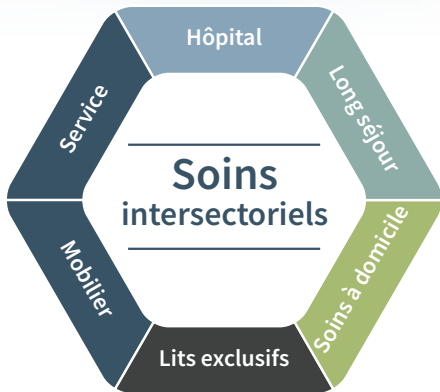

Nos marques





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com